



# MOBELI

® **ROTH** Sanitärprogramme GmbH  
Kohlbergstraße 5  
D-72213 Altensteig  
Tel +49 (0)7453/9381-0 Fax -23  
info@mobeli.de  
www.mobeli.de

## Barre télescopique articulée à indicateur de sécurité de ventouse

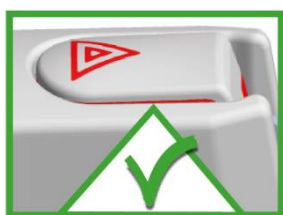

CE

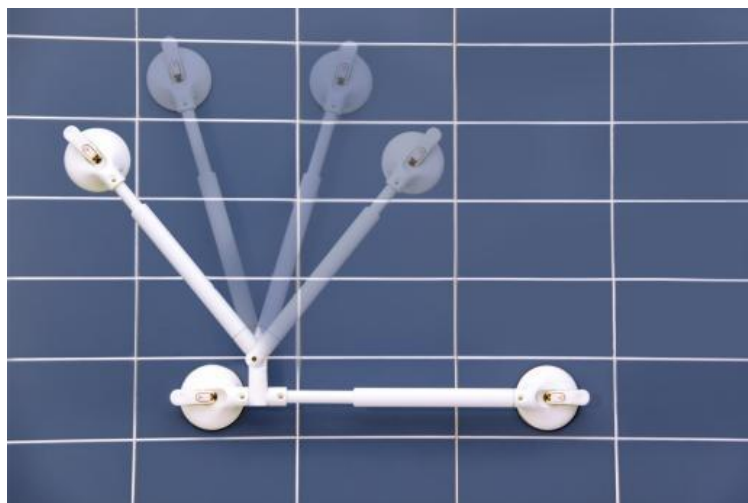

FR

Notice d'utilisation  
Main courante articulée

REF

1400222H2S; 1400223H3S; 1400226H6S; 1400227H7S



# Table des matières

1.	Informations d'ordre général.....	2
1.1	Généralités .....	2
1.2	Explications / symboles utilisés dans le manuel d'utilisation et sur la barre .....	3
1.3	Utilisation conforme.....	3
1.4	Domaine d'utilisation du produit .....	3
1.5	Pour votre information .....	3
1.6	Durée de vie .....	4
1.7	Réutilisation.....	4
2.	Consignes de sécurité.....	4
3.	Montage et démontage .....	5
3.1	Montage (voir page 9) .....	5
3.2	Mise en place et fixation des ventouses (voir pages 8 et 9) .....	5
3.3	Démontage.....	5
3.4	Désassemblage (voir page 9) .....	5
4.	Caractéristiques techniques .....	6
4.1	Marquages d'identification sur le produit.....	6
4.2	Tableau Caractéristiques techniques.....	6
4.3	Matériaux.....	6
5.	Entretien.....	6
5.1	Entretien (nettoyage/désinfection) .....	6
5.2	Entretien (maintenance).....	7
6.	Reconnaître et éliminer les dysfonctionnements .....	7
7.	Élimination .....	7
8.	Photos illustrant la mise en place et l'utilisation des barres d'appui .....	8
8.1	Figures illustrant le montage .....	8
8.2	Figures illustrant le montage et le démontage .....	8
8.3	Figures illustrant le fonctionnement de l'indicateur de sécurité de ventouse.....	10
9.	Accessoires.....	11
10.	Autres produits .....	11

## 1. Informations d'ordre général












### 1.1 Généralités

**Veillez lire avec attention ce manuel avant utilisation et suivre les consignes de sécurité pour assurer votre sécurité lorsque vous utilisez la main courante articulée amovible. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure et transmettez-la le cas échéant aux autres utilisateurs.**

**Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité énoncées dans le manuel d'utilisation.**

## 1.2 Explications / symboles utilisés dans le manuel d'utilisation et sur la barre

	Respecter les indications de la notice d'utilisation.
	Les personnes présentant une déficience visuelle peuvent consulter le présent manuel d'utilisation sur Internet à l'adresse <a href="https://www.mobeli.de/download-bereich">https://www.mobeli.de/download-bereich</a> ; la taille de la police peut être réglée selon les besoins.
	Avertissements (signalent une situation dangereuse)
	Fabricant (avec indication de l'année de fabrication sur la barre)
	Référence
	Poids maximal de l'utilisateur
	Les barres d'appui mobiles MOBELI sont conformes au Règlement (UE) 2017/745
	Les barres d'appui mobiles MOBELI sont des dispositifs médicaux de classe I
	Désignation du lot



### Remarque à l'attention des personnes allergiques:

Les disques en caoutchouc de haute qualité contiennent du latex de caoutchouc naturel. Le latex de caoutchouc naturel peut provoquer des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques.

## 1.3 Utilisation conforme



Barre de maintien ou barre de relèvement pour adultes et enfants. La main courante articulée amovible est conçue pour faciliter la motricité naturelle de l'utilisateur. **Elle n'est pas destinée à supporter tout le poids du corps.** Toute autre utilisation, par exemple comme siège, poignée de transport ou aide à l'escalade, est interdite.

## 1.4 Domaine d'utilisation du produit

La main courante articulée est destinée à une utilisation largement autonome dans un environnement clos telles que douche, baignoire, toilettes et lavabo.



**Les ventouses ne peuvent être fixées** que sur des surfaces lisses, non poreuses, rigides, étanches à la vapeur, propres, sèches et exemptes d'huile et de graisse.



Sur des surfaces rugueuses ou poreuses, la force et la durée d'adhésion sont réduites, voire inexistantes. Veuillez noter qu'une surface carrelée n'est pas nécessairement plane et étanche à la vapeur (apte à la formation du vide). **Effectuez d'abord un test sur votre carrelage et sur votre mur** (en vous faisant aider éventuellement par une deuxième personne).

Étant donné que les disques de ventouse sont fabriqués en caoutchouc naturel souple à haut pouvoir d'adhésion, ils s'adaptent aux carreaux dont la surface est légèrement structurée (**Attention:** durée d'adhésion réduite! Observer l'indicateur de sécurité).

La main courante articulée amovible est idéale à la maison, en l'absence de barres fixes, notamment pour une utilisation temporaire après un séjour à l'hôpital ou pour tester si le domicile permet une vie autonome, Elle s'utilise également en milieu hospitalier et dans les établissements de soins, en complément supplémentaire et temporaire des barres fixes.

La main courante articulée amovible est également indiquée dans les locaux ne pouvant pas être équipés de barres fixes, tels que cabine de douche en verre ou dans la baignoire. Si le perçage de trous dans les murs n'est pas autorisé (ou n'est pas possible), notamment dans un appartement loué, ou si les conduites d'eau ou les câbles électriques se trouvent dans le mur. De même, la barre de maintien MOBELI se révèle extrêmement utile lors des visites chez un médecin, des démarches auprès des services administratifs ou lors des voyages.

## 1.5 Pour votre information

Dans les hôtels et les institutions publiques en Europe, les carrelages doivent satisfaire aux normes de porosité et d'étanchéité à la vapeur (DIN/EN 159 et 176). La norme DIN EN 12004 applicable aux colles à carrelage impose une résistance à l'arrachement d'au moins 0,5N/mm<sup>2</sup>. Ainsi, deux carreaux de 147 mm x 147 mm x 0,05 kg/mm<sup>2</sup> présentent une résistance d'env. 2160kg. Même pour une surface encollée correspondant au tiers de la surface

carrelée (en raison des dents très espacées de la spatule) et une surface carrelée non jointoyée, la force de résistance est d'env. 700kg.

Comme il n'est malheureusement pas toujours possible de présumer une telle résistance, il est impératif de tester la résistance à la traction des carreaux ou autres matériaux envisagés comme support de fixation murale.

Par ailleurs, les forces de résistance peuvent être réduites en raison du vieillissement des matériaux, d'une construction sèche, rendant un essai nécessaire (demander le cas échéant l'aide d'une deuxième personne pour exercer une contrainte par à-coup).

## 1.6 Durée de vie

La durée de vie prévue est de six ans (dans le cadre d'une utilisation quotidienne conforme) dans une institution/un établissement spécialisé. À cet effet, il est indispensable de respecter les consignes d'entretien et de sécurité données dans la présente notice d'utilisation. La durée de vie réelle peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation. Ces barres sont conformes à la norme ISO 17966:2016.

## 1.7 Réutilisation

Le produit a été conçu pour un usage répété. La fréquence d'utilisation du produit dépend du type d'utilisation. Veuillez nettoyer et désinfecter soigneusement le produit avant de le réutiliser, et vérifiez soigneusement la barre, en particulier le fonctionnement de l'indicateur de sécurité de ventouse.

## 2. Consignes de sécurité



- **Avant toute utilisation de la main courante articulée amovible, il convient d'observer l'indicateur de sécurité de ventouse et de le manipuler selon les instructions données (voir page 10).**



- **Il n'est pas possible, même sur un carrelage parfaitement lisse et non poreux, de déterminer le moment exact de relâchement de la force d'adhésion des ventouses (en raison de microfissures par exemple); il est donc indispensable de toujours observer l'indicateur de sécurité de ventouse.**
- N'utilisez la main courante articulée amovible qu'après vous êtes familiarisé(e) avec son usage ou qu'en présence d'une personne connaissant bien le produit. Les enfants ne doivent utiliser la barre de maintien que sous surveillance. Il est également possible de verrouiller les leviers au moyen d'un dispositif de verrouillage (voir Accessoires, page 11).
- Avant de fixer une barre de maintien amovible, assurez-vous que celle-ci fonctionne parfaitement. Faites tout particulièrement attention au disque en caoutchouc des ventouses ; celui-ci doit être propre et en parfait état, sans fissures ni stries.



**N'utilisez jamais une barre de maintien amovible si les disques de ventouse sont endommagés ou présentent une force d'adhésion réduite.**

- Rappelez-vous que la ventouse n'adhère qu'à son support ; avant de l'utiliser à un nouvel emplacement, testez au préalable la résistance du support (par exemple des carreaux du mur).
- La force d'adhésion générée par le vide peut être réduite ou nulle après l'abaissement des leviers. C'est notamment le cas sur les carreaux non émaillés, la pierre naturelle (marbre) ainsi que les revêtements céramiques dotés de propriétés antidérapantes par structuration/ponçage ou finition rugueuse de grain fin. L'absence de vide est signalée par la remontée de la bascule de l'indicateur de sécurité.
- **Attention!** La force de résistance est réduite en cas d'utilisation de la barre de maintien sous l'eau.
- La force de retenue indiquée se réfère aux températures ambiantes normales (10 C–30 C), elle est réduite à des températures élevées, par exemple dans un sauna. **Attention!** Des températures supérieures à 41 C peuvent être atteintes par rayonnement solaire ou par contact avec de l'eau chaude, ce qui peut causer des lésions de la peau ou des brûlures.
- La force d'adhésion indiquée s'entend pour une altitude d'env. 300m au-dessus du niveau de la mer; plus l'altitude augmente, plus la force d'adhésion est réduite (d'env. 10% par 1000m d'altitude).
- N'exposez jamais les disques en caoutchouc au rayonnement UV (lumière du soleil) pour une durée prolongée, ils perdraient rapidement de leur élasticité. Par conséquent, ne fixez jamais la barre de maintien sur une vitre exposée aux rayons UV et à la lumière du soleil.
- Ne placez rien sous la barre qui risquerait d'être endommagé en cas de chute subite de la barre, ou bien retirez la barre après chaque utilisation.
- **Les barres de maintien amovibles ne doivent être utilisées que si les boutons de verrouillage sont correctement encliquetés.**



- Ne pas fixer les barres de maintien amovibles sur les tôles de véhicules automobiles, sur des feuilles en plastique ou des vitrages en verre mince, car la dépression générée dans la ventouse risquerait d'endommager ces matériaux.



- Si la barre de maintien amovible est laissée en place durant une période prolongée, le support (une baignoire par exemple) peut être coloré par les disques en caoutchouc.



- Ne jamais combiner les produits MOBELI avec des pièces d'autres fabricants. Dans un tel cas, notre responsabilité ne saurait être engagée, et tout recours en garantie sera refusé. **Risque d'accident!**

## 3. Montage et démontage

### 3.1 Montage (voir page 9)

- Enfoncer le bouton de verrouillage du support d'articulation muni de l'articulation (fig. 8, flèche gauche) et engager le support dans la tête de ventouse jusqu'à ce que le bouton de verrouillage s'encliquette dans l'orifice de la tête de ventouse (un déclic est audible). Enfoncer ensuite le bouton de verrouillage (flèche droite) de la première barre de maintien et engager la barre dans le support d'articulation.
- Enfoncer le bouton de verrouillage de la deuxième barre de maintien et engager la barre dans l'articulation (fig. 9, flèche).
- Enfoncer les boutons de verrouillage des barres de maintien et engager les barres dans les têtes de ventouse (fig. 10a et 10b, flèches) pour encliqueter les boutons de verrouillage dans les orifices.



**Vérifiez la bonne fixation de tous les boutons de verrouillage en tirant sur la barre et les têtes de ventouse. Si les boutons de verrouillage ne sont pas encliquetés, la barre de maintien ne doit pas être utilisée.**

### 3.2 Mise en place et fixation des ventouses (voir pages 8 et 9)

Vidéo de Déballage



- Examinez l'état du support et des disques de ventouse.
- Nettoyez soigneusement la surface du support (fig. 1) afin que celle-ci soit **propre** (exempte de toute trace de calcaire) et exempte de **graisse**. De même, la surface des disques de ventouse doit être propre.
- Appliquez fermement la barre de maintien amovible sur la surface du support** (fig. 3 à 5).
  - Les **leviers à genouillère** doivent être alors **desserrés**.
  - Veillez à ce que les deux **disques en caoutchouc** soient toujours appliqués **de toute leur surface** sur le carrelage ou toute autre surface, **sans être placés sur un joint** et qu'ils se trouvent à **au moins 10mm** du bord de joint inférieur (fig. 2).  
Sur la barre télescopique (réf. n° 1400222H2S, 1400223H3S), vous pouvez ajuster la longueur de la barre (fig. 6).
- Appliquez la barre et sur le levier à genouillère contre le support de fixation**, puis rabattez le levier à genouillère (fig. 2, 3, 4, 5). Il est conseillé de procéder dans l'ordre A-B-C, comme indiqué sur la figure 7. Ajuster alors la ventouse C à l'emplacement souhaité.
- Les indicateurs de sécurité de ventouse surveillent en permanence l'état du vide.  
Une fois que les leviers à genouillère ont été appuyés contre le support de fixation et rabattus, toutes les bascules des indicateurs de sécurité intégrés doivent se trouver en **position complètement rentrée**, à fleur du levier (page 10, fig. 13 et 15). Au fil du temps, le vide diminuant, les bascules de sécurité ressortent.
  - Lorsqu'un des flancs de couleur rouge des bascules de sécurité devient apparent (fig. 14 et 16), la barre de maintien ne doit plus être utilisée en aucun cas et **doit être remise en place aussitôt**.
  - Plus le flanc de couleur rouge des bascules de sécurité (fig. 14 et 16) est visible, plus la force de maintien est faible.**
- Contrôlez l'indicateur de sécurité de ventouse avant chaque utilisation. L'indicateur de sécurité est palpable pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Si la bascule de l'indicateur de sécurité ne se trouve pas en position rentrée (comme décrit plus haut), remettez en place la ventouse. Si la bascule de l'indicateur de sécurité se trouve encore en position sortie après le rabattement du levier à genouillère et après enfoncement de la bascule, la poignée doit être fixée de nouveau (voir dysfonctionnements, page 7).  
**S'il n'est pas possible d'escamoter une bascule, ne pas utiliser la barre de maintien.**



### 3.3 Démontage

- Passer un doigt sous le levier à genouillère et relever celui-ci, tout en plaçant le pouce dans le creux à texture antidérapante pour amortir le rebond du levier. **Prudence - risque de pincement en cas de mauvaise manipulation.**
- Attendre un peu. Les disques en caoutchouc se détendent au bout de 30 à 60 secondes environ. La ventouse peut être alors retirée du mur. Si les disques en caoutchouc continuent à adhérer au mur, vous pouvez également soulever les disques d'un côté avec un doigt (entre le mur et le disque en caoutchouc) afin de laisser entrer l'air sous le disque.
- Ne tentez pas de détacher le disque en caoutchouc à l'aide d'objets ou d'outils tranchants; le disque serait alors endommagé.**
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la barre de maintien amovible à plat, à l'horizontale, avec les disques de ventouse détendus (leviers à genouillère relevés). Protégez votre barre de maintien amovible des rayons UV (en la rangeant par exemple dans un carton).



### 3.4 Désassemblage (voir page 9)

Enfoncer le bouton de verrouillage (fig. 11a) et sortir la barre de maintien de la tête de ventouse, tout en retenant celle-ci (10a). Ranger les têtes de ventouse à plat, avec le levier à genouillère relevé (fig. 12). Le support d'articulation muni de l'articulation peut être alors démonté également (si souhaité) (fig. 8 et 9).

## 4. Caractéristiques techniques

### 4.1 Marquages d'identification sur le produit (signification des symboles, voir page 2)

**Important!** Les barres de maintien comportent le marquage d'identification des deux barres de maintien amovibles. La main courante (H) 1400222H2S est de ce fait dotée de barres de maintien de référence 1400222S. La main courante 1400226H6S comporte deux barres 1400226S.



Sur le dessous de la barre de maintien (C)




ROTH GmbH D-72213 Altensteig Jahr  
MOBELI.de REF 140022XS LOT XX

Sur le dessus de la barre de maintien (D)



max. XX kg  

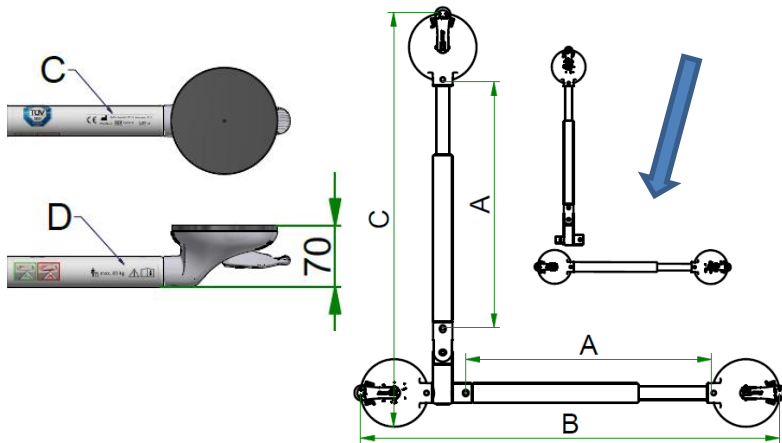

Transformation possible en une barre de maintien amovible à deux ventouses (flèche), par exemple pour une utilisation lors de voyages.

Respecter impérativement le poids maximum de l'utilisateur indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques et sur la barre de maintien.



**Les barres de maintien amovibles sont conçues pour faciliter la motricité naturelle de l'utilisateur. Elles ne sont pas destinées à supporter tout le poids du corps.**

### 4.2 Tableau Caractéristiques techniques



REF Réf. Roth n°	Longueur de barre A (réglable sur les barres télescopiques) en mm	Longueur totale B en mm	Longueur totale C en mm	Ø de la barre en mm	Poids max. d'utilisateur en kg	Poids en kg
14002 22H2S	340-465	635-760	625-750	35 / 24	85	1,92
14002 23H3S	440-565	735-860	725-850	35 / 24	85	2,30
14002 26H6S	350	645	635	35	95	1,91
14002 27H7S	650	945	935	35	95	2,40

### 4.3 Matériaux

Barre de maintien en PVC brillant haute résistance, toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable  
Disque de ventouse en NBR, boîtier de ventouse en PA 6.6, articulations en POM

## 5. Entretien

### 5.1 Entretien (nettoyage/désinfection)

- Nettoyez la barre de maintien avec un chiffon et un détergent ménager, de l'eau savonneuse par exemple, à l'exclusion de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. N'utilisez en aucun cas des solvants ou de l'essence ni autres produits de nettoyage qui attaquent le plastique.
- Douchez soigneusement la barre de maintien à l'eau chaude, pour éliminer tous les résidus de savon et de mousse (les pièces en acier inoxydable risquent sinon d'être corrodées).
- Veillez à ce que les disques en caoutchouc soient toujours exempts de poussière et de saleté en les rinçant à l'eau chaude, puis en les essuyant avec un chiffon non pelucheux.
- Désinfectez la barre de maintien en l'essuyant avec un chiffon imprégné de désinfectant.
- Dans un environnement médical, tenez compte également des «Recommandations de la Commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections» pouvant être consultées sur le site de l'Institut Robert Koch [www.rki.de](http://www.rki.de).
- La barre de maintien est résistante aux substances actives contenues dans les produits de désinfection des mains et des surfaces, certifiées par la DGHM (Commission des désinfectants de la Société allemande d'hygiène et de microbiologie), à l'exception de l'éther de phénol, des dérivés de pyridine et du thiocyanate.
- Pour les disques en caoutchouc, seule une désinfection à l'alcool, sans adjuvant surgraissant, est autorisée**




## 5.2 Entretien (maintenance)

- Si la barre reste fixée au mur pendant une durée prolongée, les disques en caoutchouc se distendent. Pour éviter cet effet, il est conseillé de détacher la barre de maintien du mur environ tous les 15 jours. Poser ensuite la barre et les disques en caoutchouc détendus, à plat, pour une nuit. Remettre la barre de maintien en place le lendemain.
- Vérifiez régulièrement si les disques en caoutchouc sont affectés dans leur fonction du fait d'une élasticité réduite due au vieillissement, à l'usure, une exposition à la lumière du soleil, un stockage sur une surface non plane ou à des stries, etc.  
En cas d'endommagement des disques en caoutchouc et de dégradation de la force d'adhésion, l'ensemble des têtes de ventouse (pièce de rechange n° 14002S) doit être remplacé, ou bien les disques en caoutchouc (n° 1402721) doivent être remplacés par un personnel spécialisé qualifié.
- Veillez à ce que l'indicateur de sécurité de ventouse soit toujours exempt de salissures.
- **Vérifiez régulièrement que la barre est en parfait état et n'utilisez pas la barre si elle est endommagée.**



## 6. Reconnaître et éliminer les dysfonctionnements

Dysfonctionnements	Causes possibles de dysfonctionnement/test	Remède
Barre de maintien neuve: l'indicateur se met en position sortie après une courte période.	Présence de calcaire ou autres saletés sur le support.	Nettoyez soigneusement le support.
	Le support n'est pas parfaitement étanche malgré un aspect lisse, ou endommagement du support (par exemple microfissuration du carrelage). Test possible: fixez la barre sur une vitre ou une glace de miroir et observez l'indicateur. Si l'indicateur reste escamoté, le défaut est dû au support.	Si possible, fixez la barre en un autre endroit étanche. Si cela n'est pas possible, des plaques autoadhésives en acier inoxydable (réf. 1461414) peuvent être collées, sur lesquelles pourra être fixée la barre de maintien. Voir Accessoires.
Barre de maintien âgée: l'indicateur se met en position sortie après une courte période.	Les disques en caoutchouc sont rayés ou endommagés.	Les disques en caoutchouc (réf. 1402721) endommagés peuvent être remplacés par un revendeur spécialisé, ou l'ensemble de la tête de ventouse devra être remplacé (réf. 14002S).
La bascule de l'indicateur dépasse légèrement après la fixation.	1. Le levier à genouillère n'a pas été appuyé assez fort avant d'être rabattu.	Fixer de nouveau la barre en appuyant fermement sur le levier à genouillère au préalable (page 8, fig. 3 3, flèche 2).
	2. Le disque en caoutchouc est distendu. Tel est le cas lorsque la barre de maintien reste fixée au mur pendant une durée prolongée.	Ranger la barre de maintien à plat, avec le levier à genouillère relevé (page 9, fig. 12). Fixer de nouveau la barre de maintien le lendemain, appuyer fermement sur le levier à genouillère avant de le rabattre. Si le disque en caoutchouc dépasse encore après que le levier à genouillère a été rabattu, le disque doit être remplacé par un revendeur spécialisé (réf. 1402721), ou bien remplacer l'ensemble de la tête de ventouse (réf. 14002S).
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Vidéo fixer la barre d'appui</div> 	

## 7. Élimination

L'emballage de la barre de maintien doit être éliminé en vue de son recyclage. Les pièces métalliques doivent être apportées dans un centre de collecte de la ferraille en vue de leur recyclage. L'élimination doit avoir lieu conformément aux dispositions légales nationales en vigueur. Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale de votre ville sur les entreprises locales d'enlèvement des déchets.

**Les barres de maintien amovibles ROTH décrites dans le présent manuel d'utilisation ne doivent pas être exportées aux États-Unis (voir version pour États-Unis).**

**Sous réserve de modifications techniques.**

## 8. Photos illustrant la mise en place et l'utilisation des barres d'appui

### 8.1 Figures illustrant le montage








**REF**

1400222H2S; 1400223H3S; 1400226H6S; 1400227H7S



8.2 Figures illustrant le montage et le démontage

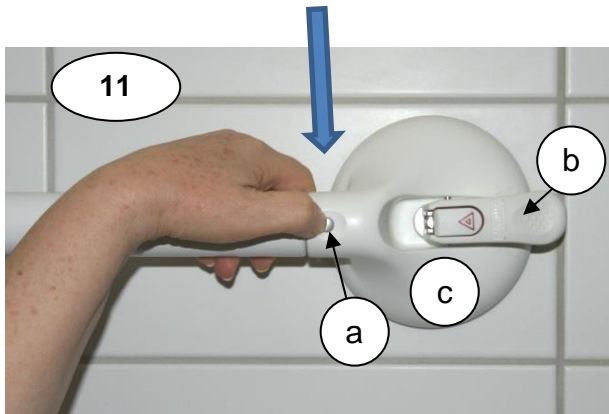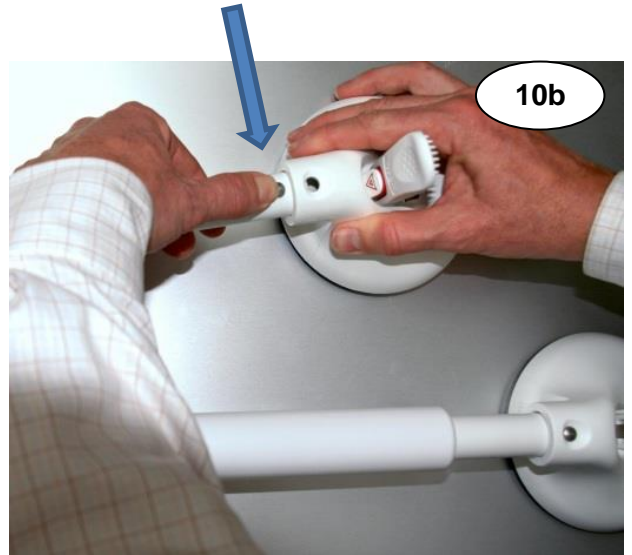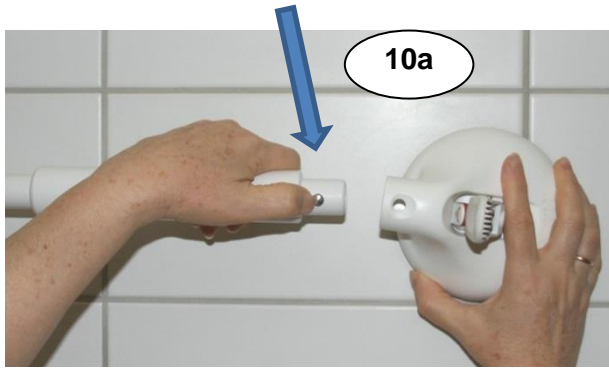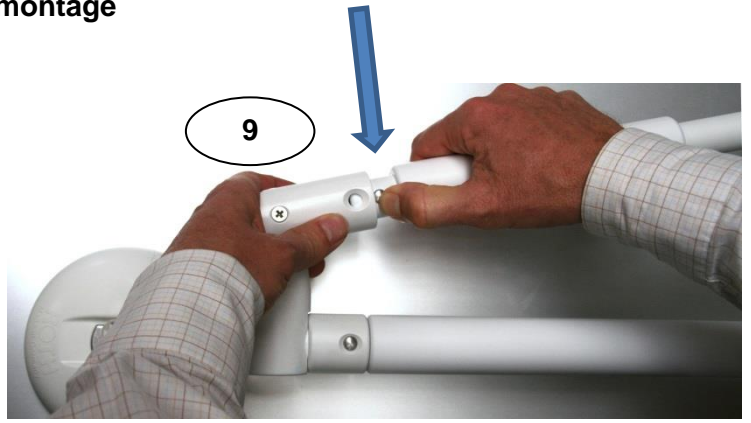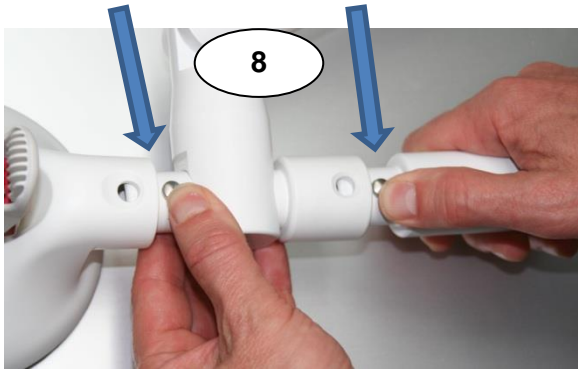

**REF** 14002S

**MOBELI**.COM  
D-72213 Altensteig

**ROTH**® Made in Germany

**Indicateur de sécurité de ventouse sur levier à genouillère:**




**Bon!**




**Force de maintien trop faible!**  
 La ventouse doit être remise en place immédiatement.  
**Risque d'accident!**

**Mode de fonctionnement de la bascule de l'indicateur de sécurité: le vide (la dépression) est soumis à une surveillance permanente.**

Explication des symboles utilisés sur les barres d'appui:

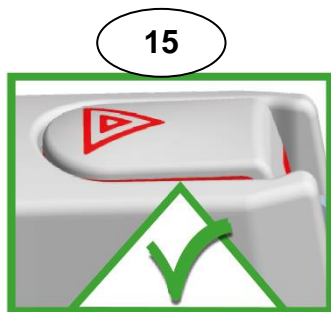

**Sécurité totale pour le poids maximum indiqué de l'utilisateur.**

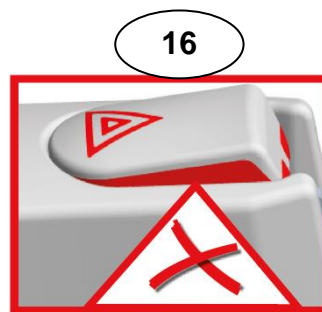

**Attention! La barre d'appui doit être fixée de nouveau immédiatement.**

Le vide de la barre d'appui est réduit. L'utilisation de la barre n'est plus autorisée pour le poids maximum de l'utilisateur (pour information seulement: une force de maintien réduite reste disponible).

## 9. Accessoires

Une gamme d'accessoires est disponible auprès de votre revendeur spécialisé.

Afin d'éviter que des personnes non autorisées (telles que personnes atteintes de démence, enfants, ou encore dans des lieux publics) ne puissent détacher la barre de maintien, nous conseillons un dispositif de verrouillage des leviers à genouillère.

**REF**

1400673 (3 dispositifs de verrouillage, 1 clé).

Vidéo verrouillage du  
levier à genouillère



Adaptateur d'angle articulé

Réf. 1400558, pour utilisation dans les angles

Rallonge du levier à genouillère

Réf. 1400573, facilite le rabattement du levier à genouillère

Anneaux souples de couleur contrastante

Réf. 1402766, pour un contraste accentué, pour personnes malvoyantes

Plaques en acier inox

Réf. 1461414 (2 pièces) pour carreaux poreux

Réf. 1461412 (1 pièce), pour carreaux poreux

## 10. Autres produits

Si le poids maximum supporté doit être plus élevé, nous conseillons notre gamme QuattroPlus.

Les barres de maintien QuattroPlus sont conçues pour un poids maximum de l'utilisateur de 160 kg.



Si vous souhaitez des informations complémentaires ou des vidéos de présentation de nos produits, veuillez consulter notre site web: [www.mobeli.de](http://www.mobeli.de).  
Le manuel d'utilisation peut être téléchargé dans notre espace de téléchargement: [www.mobeli.de/download-bereich](http://www.mobeli.de/download-bereich).

Vidéo  
MOBELI  
Produits



Une marque



**MOBELI**®

**ROTH** Sanitärprogramme GmbH  
Kohlbergstraße 5  
D-72213 Altensteig  
Tél (+49) 07453/9381-0 Fax -23  
info@mobeli.de  
www.mobeli.de