


Instructions de montage :

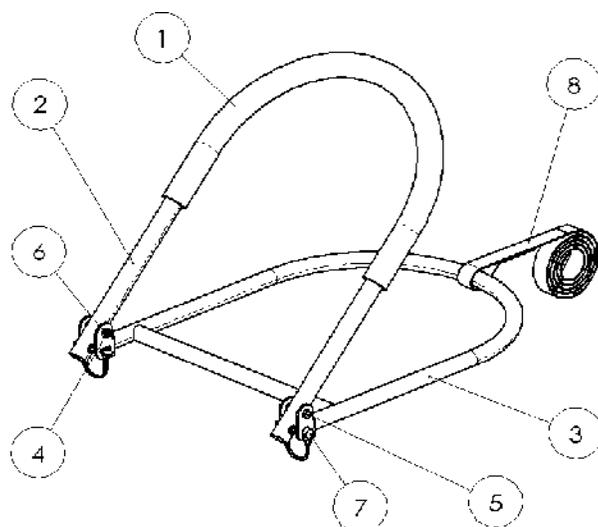

1. Sortez le produit de l'emballage et retirez les **ergots de sécurité** (7).
2. Faites basculer la **barre d'appui** (2) en position verticale jusqu'à atteindre un angle de 90 degrés par rapport à la **barre horizontale** (3).
3. Alignez les trous perforés à la base de la **barre d'appui** (2) avec les trous de l'**attache** (4).
4. Insérez les **ergots de sécurité** (7) dans les trous préalablement alignés afin de verrouiller la **barre d'appui** (2) dans la position adaptée à l'utilisateur.

5. CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- ✓ Assurez-vous que la hauteur de la barre d'appui ne crée pas d'espace libre entre la barre de lit Advantage et la partie supérieure du matelas, afin d'éviter le piégeage de la tête, du thorax, des bras ou des jambes de l'utilisateur.
 - ✓ Positionnez la barre de lit Advantage à une distance d'au moins 60 centimètres de la tête de lit ou du pied de lit afin d'éviter tout risque de piégeage.
 - ✓ Vérifiez que la lanière de sécurité maintient parfaitement la barre de lit Advantage contre le bord du matelas afin d'éviter tout espace entre la barre de lit et le bord du matelas.
 - ✓ Veuillez lire les consignes de sécurité figurant au verso de cette notice d'instruction.
6. Placez la **lanière de sécurité** (8) autour de la **barre horizontale** (3) et enroulez la **lanière de sécurité** (8) autour du cadre de lit, comme indiqué ci-dessous. Ajustez la **lanière de sécurité** (8) afin que la barre de lit Advantage soit positionnée parfaitement contre le bord du matelas, de manière à éviter tout piégeage et tout déplacement de la barre de lit.
 7. **IMPORTANT** : La **barre horizontale** (3) **DOIT** impérativement être placée entre le matelas et le sommier du lit. Le matelas doit recouvrir parfaitement toute la structure de la **barre horizontale** (3). N'utilisez pas la barrière de lit Advantage avec un matelas léger, notamment en mousse. Les matelas légers peuvent augmenter le risque de piégeage (voir les consignes de sécurité figurant au verso de cette notice d'instruction).

Fichier Instructions Advantage bedkhek EN voor vertaling:

