



# Stander® Live the longer life you love®


Tél : + 1800.506.9901 ▲ Fax : +1435.787.2301 ▲ 74 Canterbury Cir ▲ Logan, UT 84321, États-Unis ▲ [Stander.com](http://Stander.com) ▲ [Sales@Stander.com](mailto:Sales@Stander.com)

## Notice d'instructions d'assemblage

### Liste des pièces :

Fichier Instructions Assist a Tray EN voor vertaling:

Liste des pièces:

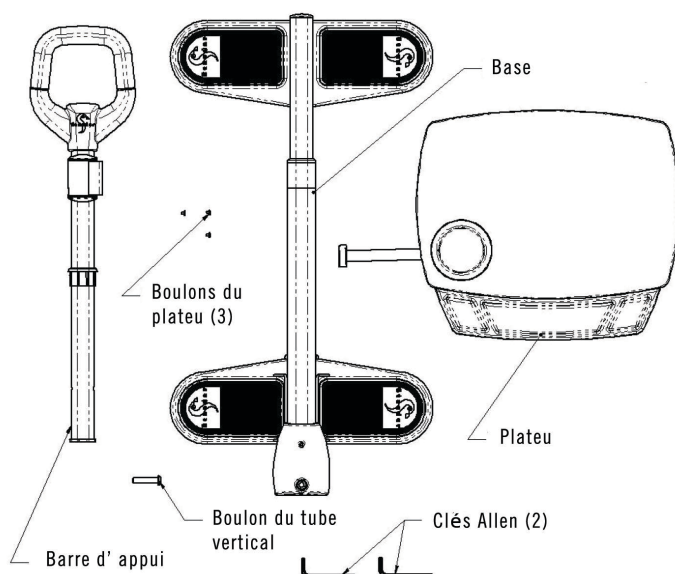

### Étape 1 :

Faites pivoter le **tube fixe vertical** à la verticale, comme indiqué dans le schéma 1, puis insérez le **boulon du tube vertical** dans le grand trou du cache en plastique situé à la base du **tube fixe vertical**. Serrez ensuite le **boulon du tube vertical** à l'aide de la **clé Allen**.

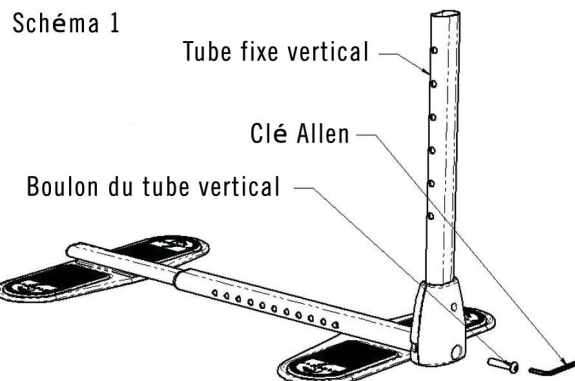


Schéma 1

## Étape 2 :

Pour fixer correctement la **barre d'appui** au **tube fixe vertical**, l'**embout de la barre d'appui** doit être entièrement inséré dans le **tube fixe vertical**.

Pour cela, la **barre d'appui** doit être placée de sorte que le **bouton à ressort** puisse bien s'insérer dans tous les trous du tube fixe vertical.

Continuez de pousser sur la **barre d'appui** jusqu'à ce que l'**embout de la barre d'appui** soit parfaitement inséré dans le **tube fixe vertical**.

Une fois l'**embout de la barre d'appui** correctement installé, réglez la barre à la hauteur désirée, en appuyant sur le **bouton à ressort** pour élever ou abaisser la **barre d'appui**.

## Étape 3 : (Accessoire facultatif)

Si vous souhaitez utiliser le plateau, fixez l'**attache du plateau** sur l'**attache verticale**, comme indiqué sur les schémas 3A et 3B.

Schéma 2

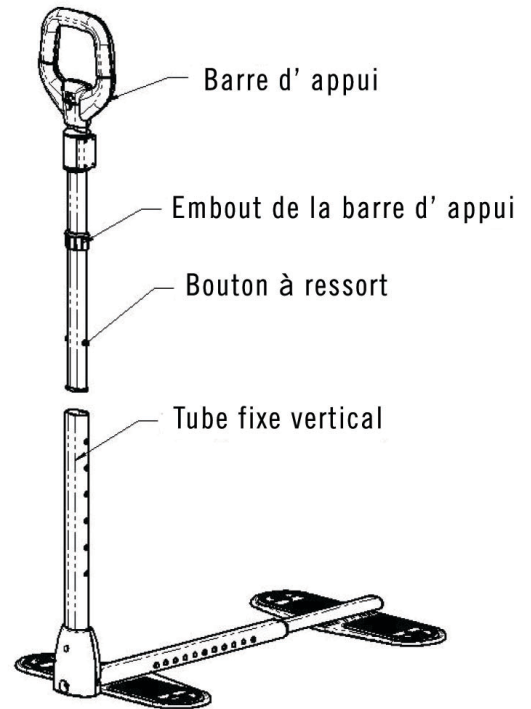


Schéma 2

Schéma 3A

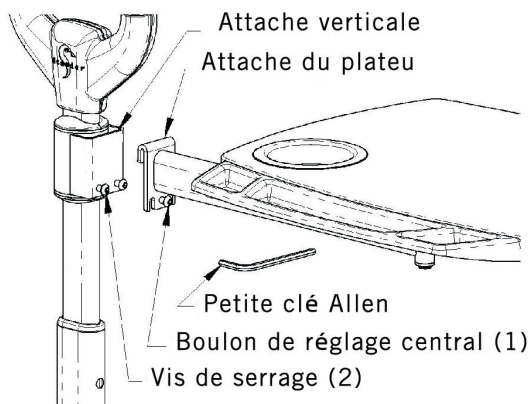


Schéma 3A

Fixez le plateau à l'horizontal à l'aide de la **petite clé Allen**, puis faites pivoter le **boulon de réglage central**

dans le sens des aiguilles d'une montre afin d'élever le plateau. Pour abaisser le plateau, faites pivoter le **boulon de réglage central** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois le plateau installé au niveau souhaité, resserrez les 2 vis de serrage, comme indiqué sur le schéma 3B.

Schéma 3B

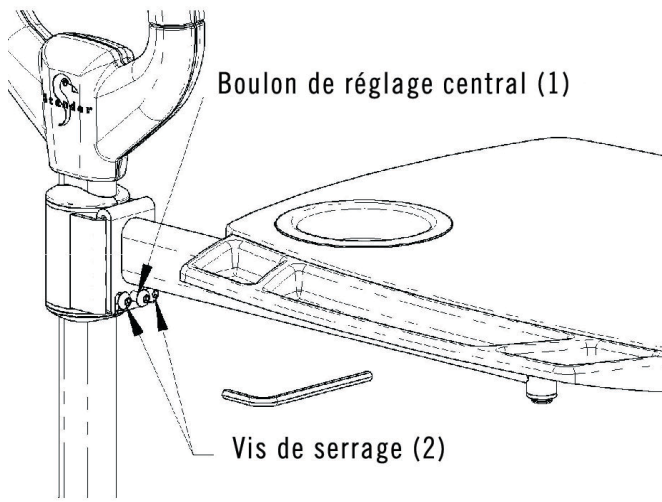


Schéma 3B

## Étape 4 :

Une fois le produit assemblé, installez-le où vous le souhaitez, près du canapé ou d'une chaise.

Ajustez la longueur du **Tube amovible de la base** de sorte que les pieds du canapé ou de la chaise soient centrés sur les patins en caoutchouc du **tube amovible** et du **tube fixe de la base**, comme indiqué sur les schémas 4 et 5.

Schéma 4

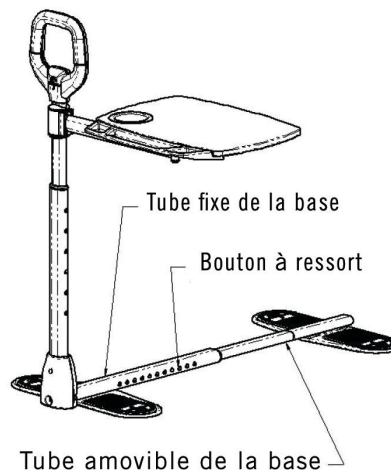


Schéma 4

## Étape 5 :

Veillez à ce que les tubes fixe et amovible de la base soient réglés à bonne distance, de sorte que les pieds avant et arrière du meuble reposent bien sur les patins en caoutchouc du produit, comme indiqué dans le schéma 5.

Schéma 5

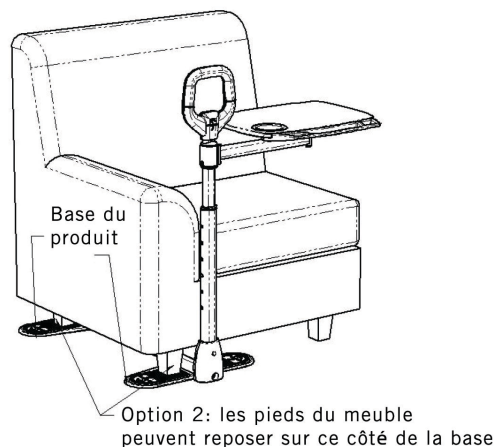
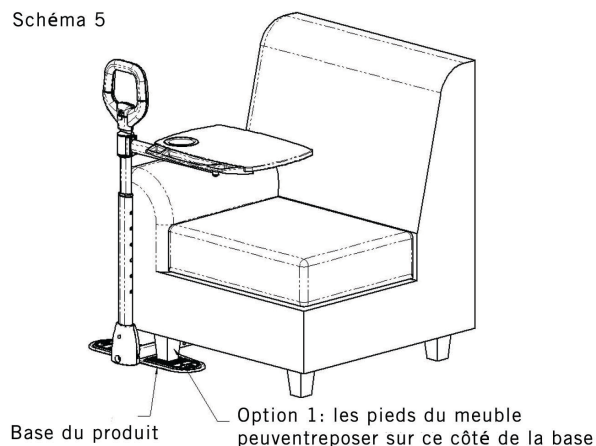


Schéma 5

**Remarque :** Les pieds de la chaise ou du canapé doivent reposer parfaitement sur les patins en caoutchouc du produit ET être placés aussi près que possible des tubes fixe et amovible de la base.