

Instructions :

1. Sortez tous les composants de l'emballage et vérifiez qu'il ne manque aucune des pièces indiquées dans le schéma 1.

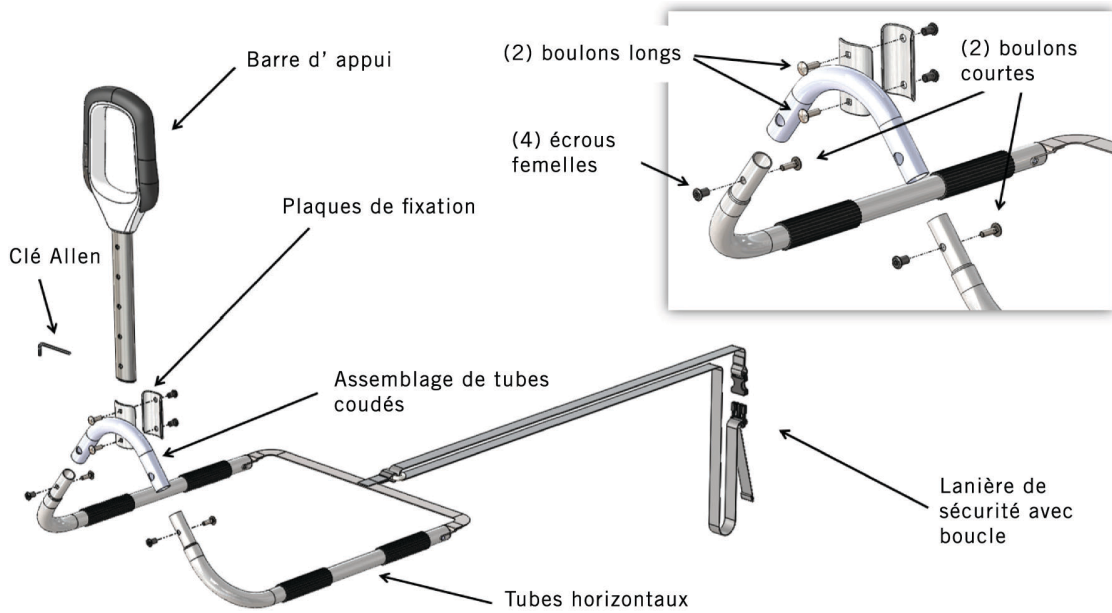


SCHÉMA 1

2. Fixez le tube coudé sur les tubes horizontaux à l'aide des boulons courts et des écrous femelles, en utilisant la clé Allen, comme indiqué dans le schéma 2.

REMARQUE : Le fil d'attache métallique situé à l'extrémité des tubes horizontaux doit être orienté comme indiqué dans le schéma 2.

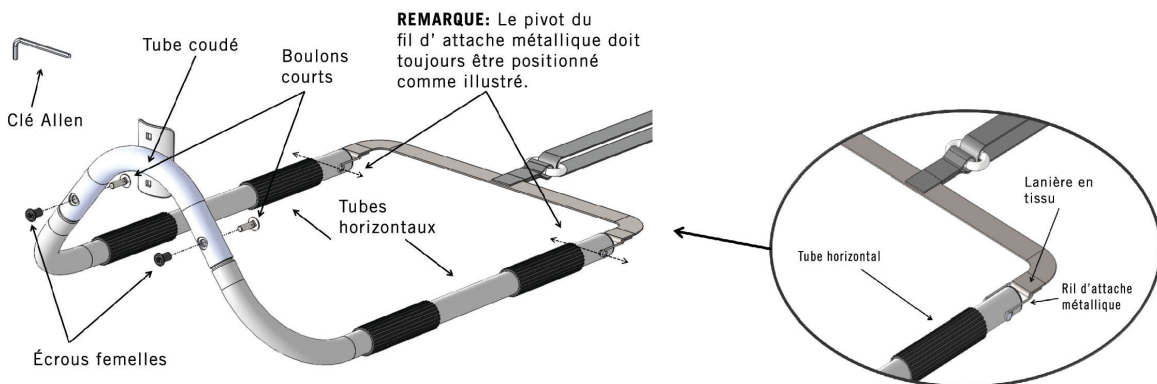


SCHÉMA 2

3. Les trous d'ajustement de la hauteur de la barre d'appui permettent de positionner correctement la barre d'appui selon les différentes épaisseurs de matelas (25 à 43 cm).

Le « haut de la barre d'appui » doit être positionné entre 10 et 18 cm au-dessus de la partie supérieure du matelas, et la barre d'appui doit être située à au moins 32 cm de la tête du lit, comme indiqué dans le schéma 3.

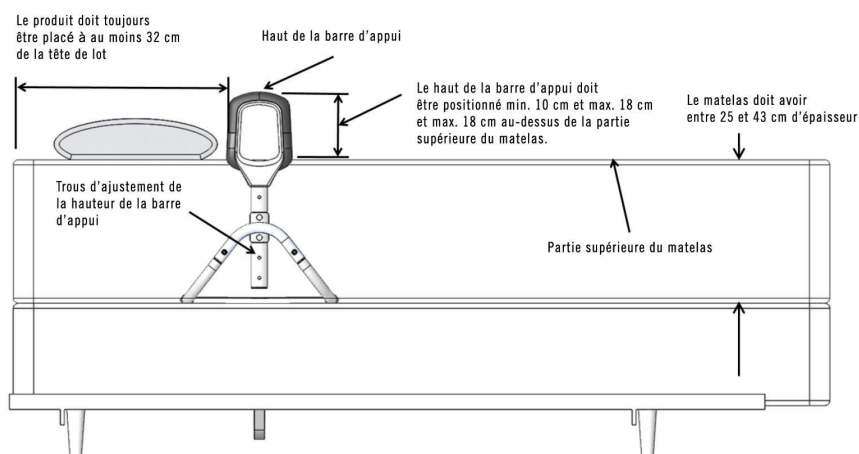


SCHÉMA 3

4. Déterminez les « trous d'ajustement de la hauteur de la barre d'appui » à utiliser, en fonction de la hauteur souhaitée. Fixez la barre d'appui sur le tube coudé à l'aide des plaques de fixation, des boulons longs et des écrous femelles, en utilisant la clé Allen comme indiqué dans le schéma 6.

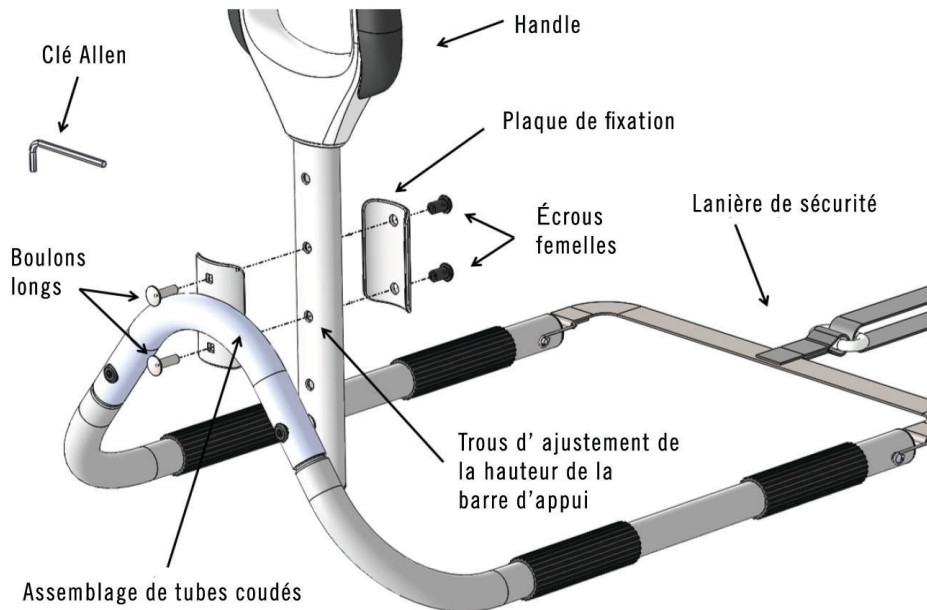


SCHÉMA 4

5. **Avertissement relatif au piégeage :** Attachez la LANIÈRE DE SÉCURITÉ au cadre du lit, comme indiqué dans le schéma 5. Détachez la lanterne de sécurité, enroulez-la autour du cadre de lit puis rattachez-la. Serrez la lanterne afin de fixer l'assemblage parfaitement contre le bord du matelas, comme indiqué dans le schéma 5. Vous pouvez installer le produit sur le côté du lit de votre choix. Toutefois, il convient de glisser la LANIÈRE DE SÉCURITÉ entre le matelas et le sommier et de la fixer sur le cadre de lit, du côté opposé.

N'installez PAS le produit sans attacher la LANIÈRE DE SÉCURITÉ au cadre de lit, comme indiqué dans le schéma 5. Si vous avez des questions, veuillez contacter Stander au +1 800 506 9901 ou au +1 435 755 0453.

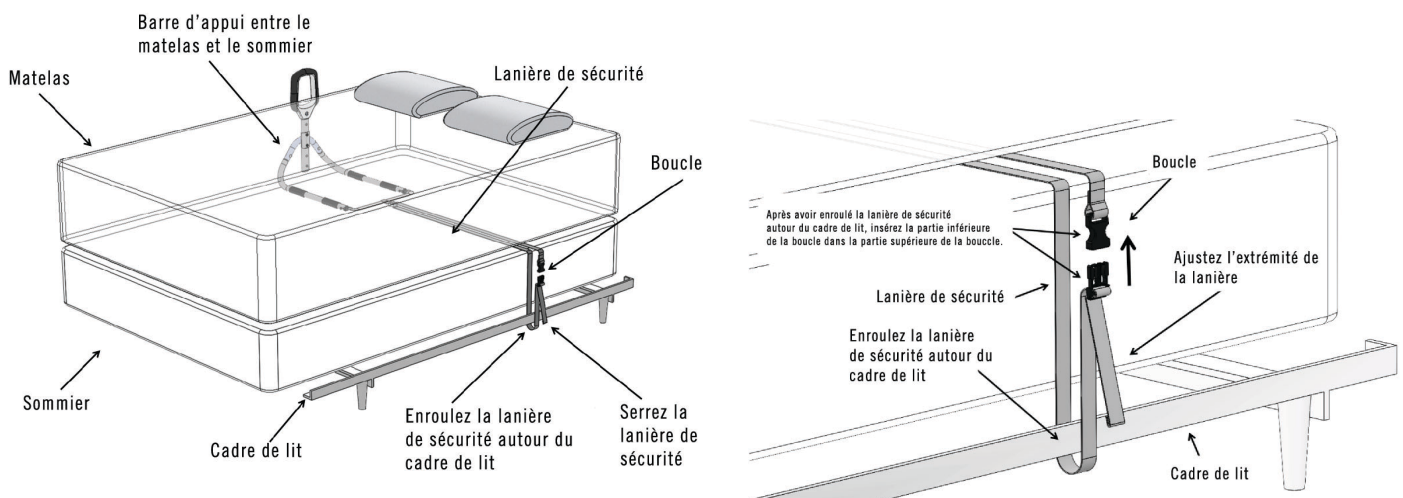


SCHÉMA 5

6. Il est essentiel que la barre de lit soit bien fixée contre le bord du matelas. La lanterne de sécurité doit venir s'enrouler autour du cadre de lit du côté opposé du lit, et doit être bouclée et ajustée, comme indiqué dans le schéma 6.

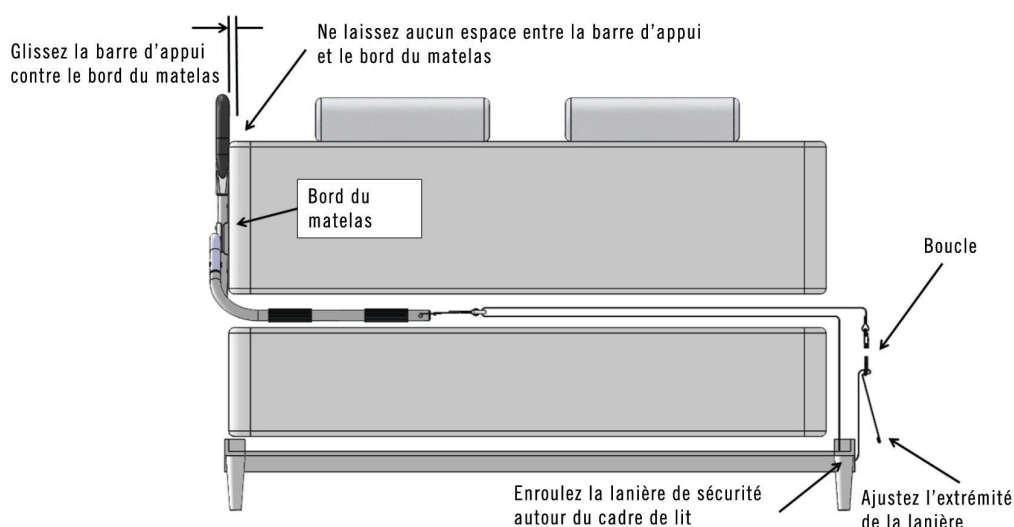


SCHÉMA 6

Instructions 7610 Confidence Bed Handle V 1.0