

Passez d'une canne de marche à un siège en un instant !

Nous vous remercions d'avoir choisi la canne-siège Linden Elite. Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

- **Elite Stroller** – Hauteur de marche : 825 mm
Hauteur d'assise : 755 mm
- **Elite Walker** – Hauteur de marche : 855 mm à 935 mm
et **Tracker** Hauteur d'assise : 775 mm à 850 mm
- **Elite Packaway** – Hauteur de marche : 815 mm à 925 mm
Hauteur d'assise : 735 mm à 815 mm
- **Poids maximum supporté : 125 kg**

La canne -siège Elite est conçue pour n'être utilisée que par une personne. Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.

AVERTISSEMENT : le tube unique des cannes -sièges est adapté aux personnes capables de s'équilibrer sans risque sur le siège et de former un trépied stable en partageant leur poids équitablement entre le siège et les pieds. Si vous avez un handicap ou une maladie qui peut affecter votre équilibre, demandez toujours conseil à votre médecin avant utilisation.

1. Le cas échéant, la hauteur est réglable en appuyant sur les deux boutons à ressort et en faisant coulisser le pied à la longueur souhaitée. Assurez-vous de bien remettre les deux boutons dans leurs encoches avant utilisation.
2. Pour ouvrir le siège : saisissez le manchon de verrouillage noir et tirez-le fermement vers le bas.
3. Rabattez le siège dans en position horizontale. Assurez-vous que le manchon de verrouillage s'est totalement enclenché dans le siège.
4. Placez le siège derrière vous en mettant la base à environ 35 cm. Penchez le siège vers vous et asseyez-vous doucement avec vos pieds à 35 cm d'écart.



MODÈLE PACKAWAY

Tout d'abord, enlevez les deux pieds du sac. Puis enlevez le siège en vous assurant de tenir à la fois le siège et les tubes. Retirez doucement les tubes pour qu'ils puissent s'empiler.

MODÈLES
DISPONIBLES

Stroller
(non réglable,
embout en
caoutchouc)

Walker
(réglable, embout
en caoutchouc)

Tracker
(réglable, pique et
rondelle pour les
sols meubles
seulement)

Packaway
(réglable, embout
en caoutchouc,
pique et rondelle)

COULEURS
DISPONIBLES
Noir ou vert