

# Quattro

GAMME DE SIÈGES

## Passez d'une canne de marche à un siège en un instant!

Nous vous remercions d'avoir choisi la canne- siège Linden Quattro. Nous vous souhaitons de nombreuses années d'utilisation heureuse. Pour votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes :

- Quattro 32 – Hauteur de marche : 815 mm  
Hauteur d'assise : 480 mm
- Quattro 34 – Hauteur de marche : 865 mm  
Hauteur d'assise : 525 mm
- Quattro 37 – Hauteur de marche : 940 mm  
Hauteur d'assise : 590 mm
- Poids maximum supporté : 125 kg

Votre canne- siège Quattro est livrée avec quatre embouts en caoutchouc et elle a été conçue pour être utilisée sur des surfaces planes et non-glissantes.

**NB: vérifiez régulièrement que tous les embouts en caoutchouc soient en bon état. Pour votre sécurité, n'utilisez JAMAIS la canne siège s'il manque un embout.**



1. Pour l'utiliser comme un siège: ouvrez-le complètement et assurez-vous que tous les pieds soient en contact avec le sol.
2. Asseyez-vous doucement. Pour un maximum de stabilité, il est important que vos jambes soient placées devant vous, et que vos deux pieds soient fermement au sol lorsque vous êtes assis.
3. La canne -siège Quattro est conçue pour n'être utilisée que par une personne. Ne pas l'utiliser pour quoi que ce soit d'autre.



## MODÈLES DE SIÈGE SPORT

Avec sa pique et sa rondelle en plus, le modèle Sport peut être utilisé sur un sol meuble en enlevant tous les embouts en caoutchouc. Replacer tous les embouts en caoutchouc pour une utilisation sur un sol dur.

MODÈLES  
DISPONIBLES

Armature en  
aluminium  
poli et toile  
colorée

Ou

armature  
"Deluxe"  
peinte  
assortie à  
la couleur  
de la toile –

COULEURS  
DISPONIBLES

Noir ou Vert

