

## Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Elite zit-/wandelstok. Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed door zodat u de zit-/wandelstok veilig kunt gebruiken:

- **Elite Stroller** – Hoogte bij gebruik als wandelstok, zitting opgeklapt: 825 mm    Zithoogte: 755 mm
- **Elite Walker** – Hoogte bij gebruik als wandelstok, zitting en Tracker opgeklapt: 855 - 935 mm    Zithoogte: 775 - 850 mm
- **Elite Packaway** – Hoogte bij gebruik als wandelstok, zitting opgeklapt: 815 - 925 mm    Zithoogte: 735 - 815 mm
- **Max. gewicht gebruiker: 125 kg**

Uw Elite zit-/wandelstok is uitsluitend bedoeld als zitje voor 1 persoon. Niet gebruiken voor andere toepassingen.

**OPGELET:** enkele buisvormige zitstokken zijn bedoeld voor mensen die veilig kunnen balanceren op het zitje en een stabiele driepikkel vormen met hun gewicht, evenredig verdeeld tussen zitje en voeten. Indien u een handicap of aandoening hebt die uw evenwichtsgevoel kan aantasten, dient u steeds medisch advies in te winnen vóór gebruik.

1. Hoogteverstelling (indien van toepassing): druk beide verende knoppen in en stel de lengte in door de buizen in of uit elkaar te schuiven. Zorg ervoor dat beide knoppen goed vergrendeld zijn in de gaatjes voordat u de stok gebruikt.
2. Uitklappen: pak de zwarte vergrendelhuls stevig vast en trek deze omlaag.
3. Trek de zitting met de punt omhoog tot deze horizontaal is. Verzekert u ervan dat de rand van de zwarte vergrendelhuls goed in de uitsparingen aan de onderzijde van de zitting zit.
4. Houd de stok achter u met de dop of punt ca. 35 cm van u af. Houd de zitting onder uw zitvlak en ga langzaam zitten, met uw voeten ca. 35 cm uit elkaar.



**PACKAWAY** Neem eerst de twee inschuifbuisjes uit de tas. Neem dan de zitting uit de tas; houd terwijl u dit doet de zitting en buizen vast. Breng de buizen rustig in elkaars verlengde en schuif ze in elkaar.



**BESCHIKBARE  
MODELLEN**

**Stroller**  
(niet verstelbaar,  
rubber dop)

**Walker**  
(verstelbaar, rubber  
dop)

**Tracker**  
(verstelbaar, met  
punt en plaat, alleen  
voor gebruik op  
zachte ondergrond)

**Packaway**  
(verstelbaar, met  
rubber dop; extra  
inschuifbuisje met  
punt en plaat)

**BESCHIKBARE  
KLEUREN**  
Zwart of groen