

Supaseat

ZIT-/WANDELSTOK

Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Supaseat zit-/wandelstok. Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed door zodat u de zit-/wandelstok veilig kunt gebruiken:

- **Supaseat – Observer, Explorer, Foldaway en Gripseat**


**Hoogte bij gebruik als wandelstok,
zitting opgeklapt: 850 tot 1030 mm
Zithoogte: 650 tot 830 mm**

- **Max. gewicht gebruiker: 125 kg**

Uw Supaseat zit-/wandelstok is uitsluitend bedoeld als zitje voor 1 persoon. Niet gebruiken voor andere toepassingen.

OPGELET: enkele buisvormige zitstokken zijn bedoeld voor mensen die veilig kunnen balanceren op het zitje en een stabiele driepikkel vormen met hun gewicht, evenredig verdeeld tussen zitje en voeten. Indien u een handicap of aandoening hebt die uw evenwichtsgevoel kan aantasten, dient u steeds medisch advies in te winnen vóór gebruik

1. Hoogteverstelling (indien van toepassing): druk beide verende knoppen in en stel de lengte in door de buizen in of uit elkaar te schuiven. Zorg ervoor dat beide knoppen goed vergrendeld zijn in de gaatjes voordat u de stok gebruikt.

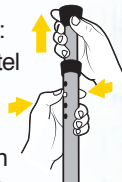

2. Houd de stok achter u met de dop of punt ca. 45 cm van u af. Houd de zitting onder uw zitvlak en ga langzaam zitten, met uw voeten ca. 45 cm uit elkaar.



FOLDAWAY (afbeelding hieronder)

Neem eerst het inschuifbuisje met punt en plaat uit de tas. Neem dan de zitting uit de tas; houd terwijl u dit doet de zitting en buizen vast.

Breng de buizen rustig in elkaars verlengde en schuif ze in elkaar.



GRIPSEAT

De Gripseat, met de magneet aan het uiteinde, is ideaal voor het oppakken van hulzen bij het jagen.

BESCHIKBARE
MODELLEN

Observer:
met rubber dop

Explorer:
met punt en plaat,
alleen voor gebruik
op zachte
ondergrond

Foldaway:
met rubber dop; extra
inschuifbuisje met
punt en plaat

Gripseat:
met punt en plaat,
alleen voor gebruik
op zachte ondergrond;
magneet aan uiteinde

BESCHIKBARE
KLEUREN

Zwart, bruin
of groen