

Quattro

ZIT-/WANDELSTOKKEN

Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Quattro zitje. Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed door zodat u het zitje veilig kunt gebruiken:

- **Quattro 32** – Hoogte van de handgreep – opgeklapt: 815 mm
Zithoogte: 480 mm
- **Quattro 34** – Hoogte van de handgreep – opgeklapt: 865 mm
Zithoogte: 525 mm
- **Quattro 37** – Hoogte van de handgreep – opgeklapt: 940 mm
Zithoogte: 590 mm
- **Max. gewicht gebruiker: 125 kg**

Uw Quattro zitje is voorzien van 4 rubber doppen en ontworpen voor gebruik op vlakke, niet gladde, oppervlakken.

N.B. Controleer regelmatig of alle rubber doppen nog in goede staat verkeren. Gebruik de Quattro NOOIT wanneer een of meer rubber doppen ontbreken.



1. Gebruik als zitje: klap de Quattro uit en zorg ervoor dat alle pootjes goed op de grond staan.
2. Ga langzaam zitten. Voor optimale stabiliteit is het van belang dat u met de benen naar voren zit en altijd beide voeten op de grond houdt, zie afb.
3. De Quattro is uitsluitend bedoeld als zitje voor 1 persoon. Gebruik het niet voor andere doeleinden.



SPORT-ZITJES

De Sportuitvoeringen met extra punt en plaat kunnen worden gebruikt op een zachte ondergrond nadat de rubber doppen zijn verwijderd. Breng de rubber doppen weer aan voordat u de Quattro weer op een harde ondergrond gaat gebruiken.



BESCHIKBARE
MODELLEN

Gepolijste
aluminium
uitvoering
of

'Deluxe'
met gecoat
frame in de
kleur van de
zitting –

BESCHIKBARE
KLEUREN

Zwart of groen

