

## Verandert in een oogwenk van wandelstok in een zitje!

Hartelijk dank voor uw keuze voor een Linden Trio zitje. Wij wensen u vele jaren gebruiksplezier. Lees alle aanwijzingen goed door zodat u het zitje veilig kunt gebruiken:

- Trio Popular – Hoogte van de handgreep – opgeklapt: 845 mm  
Zithoogte: 455 mm
- Trio Maxi – Hoogte van de handgreep – opgeklapt: 870 mm  
Zithoogte: 575 mm
- Max. gewicht gebruiker: 125 kg

Uw Trio zitje is voorzien van 3 rubber doppen en ontworpen voor gebruik op vlakke, niet gladde, oppervlakken.

N.B. Controleer regelmatig of alle rubber doppen nog in goede staat verkeren. Gebruik de Trio NOOIT wanneer een of meer rubber doppen ontbreken.



1. Gebruik als zitje: klap de Trio uit en zorg ervoor dat alle pootjes goed op de grond staan.
2. Ga langzaam zitten, altijd met de rug naar het handvat. Houd altijd beide voeten op de grond, zie afb.
3. De Trio is alleen bedoeld als zitje voor 1 persoon. Gebruik het niet voor andere doeleinden.



## SPORT-ZITJES

De Sportuitvoeringen met extra punt en plaat kunnen worden gebruikt op een zachte ondergrond nadat de rubber doppen zijn verwijderd. Breng de rubber doppen weer aan voordat u de Trio weer op een harde ondergrond gaat gebruiken.



BESCHIKBARE  
MODELLEN

Gepolijste  
aluminium  
uitvoering  
of

'Deluxe'  
met gecoat  
frame in de  
kleur van de  
zitting –

BESCHIKBARE  
KLEUREN

Zwart, bruin  
of groen