

## PROTOCOL – BEDPAN OPVANGZAKKEN



### Omschrijving

Hygiënische zakken voor eenmalig gebruik voorzien van een handige treksluiting en absorberende inlegger voor ontlasting, urine en andere lichaamsvloeistoffen.

Medisch hulpmiddel klasse I – CE.


### Aanbevolen voor

- Revalidatie
- Ambulance en medisch vervoer
- Isolatie patiënten
- Intensive care
- Chirurgie
- Maag darm operaties
- Verkoeverkamer
- Spoedeisende Hulp
- Verloskunde

### Voorzorgsmaatregel

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en schort).
- Gebruik en voer af volgens de regels van de instelling. Niet doorspoelen.
- Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

## Gebruiksaanwijzing

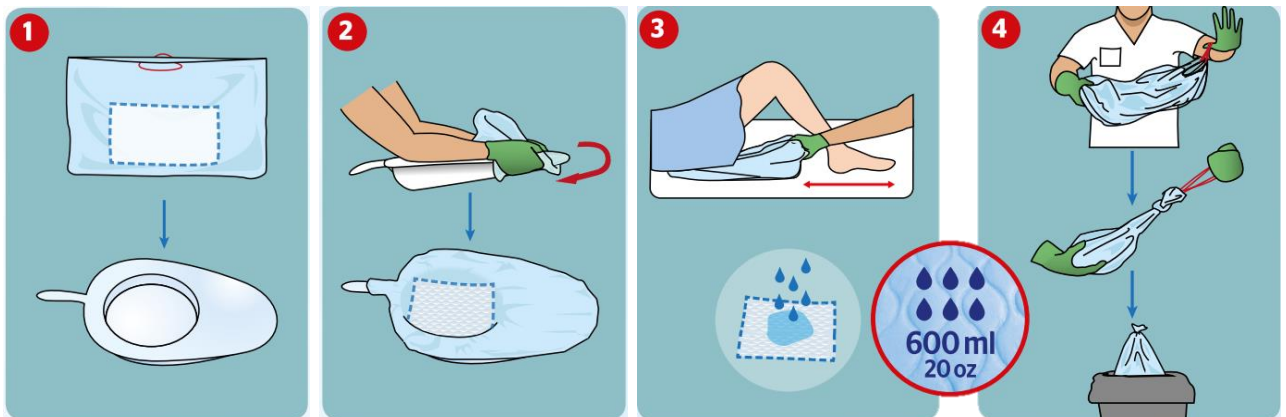

1. Open de doos en scheur de eerste zak af langs de perforatie.
2. Plaats de zak over de bedpan. De zak beschermt de gehele bedpan. De inlegger op de bodem van de zak in de bedpan plaatsen (absorptie tot 600 ml/20 oz lichaamsvloeistoffen)
3. Positioneer de bedpan onder het achterwerk. De patiënt doet zijn behoefte.
4. Haal de volle zak weg, trek aan de koordjes en knoop de zak dicht. Indien nodig, maak een knoop in de zak zelf. Gooi weg bij het restafval of volgens de regels van de instelling (bij een infectie afvoeren bij klinisch afval).