

PROTOCOL – URINE OPVANGZAKKEN



Omschrijving

Hygiënische zakken voor eenmalig gebruik voorzien van een handige treksluiting en absorberende inlegger voor urine en andere lichaamsvloeistoffen.

Medisch hulpmiddel klasse I – CE.


Aanbevolen voor

- Revalidatie
- Ambulance en medisch vervoer
- Isolatie patiënten
- Intensive care
- Chirurgie
- Maag darm operaties
- Verkoeverkamer
- Spoedeisende Hulp

Voorzorgsmaatregel

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en schort).
- Gebruik en voer af volgens de regels van de instelling. Niet doorspoelen.
- Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruiksaanwijzing

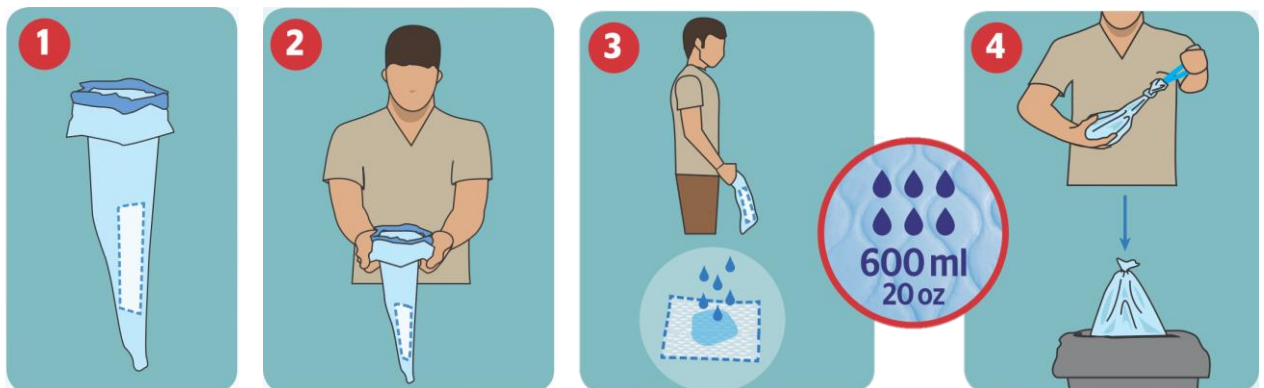

1. Open de doos en scheur de eerste zak af langs de perforatie.
2. De zak is klaar voor gebruik, de handen zijn volledig beschermd, de inlegger op de bodem van de zak plaatsen (absorptie tot 600 ml/20 oz lichaamsvloeistoffen)
3. De patiënt plast in de zak.
4. Haal de volle zak weg, trek aan de koordjes en knoop de zak dicht. Indien nodig, maak een knoop in de zak zelf. Gooi weg bij het restafval of volgens de regels van de instelling (bij een infectie afvoeren bij klinisch afval).