

## PROTOCOL – BRAAKSEL OPVANGZAKKEN

### Omschrijving

Hygiënische zakken voor eenmalig gebruik voorzien van handige treksluiting en absorberende inlegger voor de opvang van braaksel.

Medisch hulpmiddel klasse I – CE.

### Aanbevolen voor


- Geriatrie, met name bij een uitbraak/epidemie (gastro-enteritis, noro virus, etc.)
- Afdeling Oncologie
- Ambulance en medisch vervoer
- Spoedeisende Hulp
- Verkoeverkamer
- Pre- en post-operatief

### Voorzorgsmaatregel

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en schort).
- Gebruik en voer af volgens de regels van de instelling. Niet doorspoelen.
- Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.



## Gebruiksaanwijzing

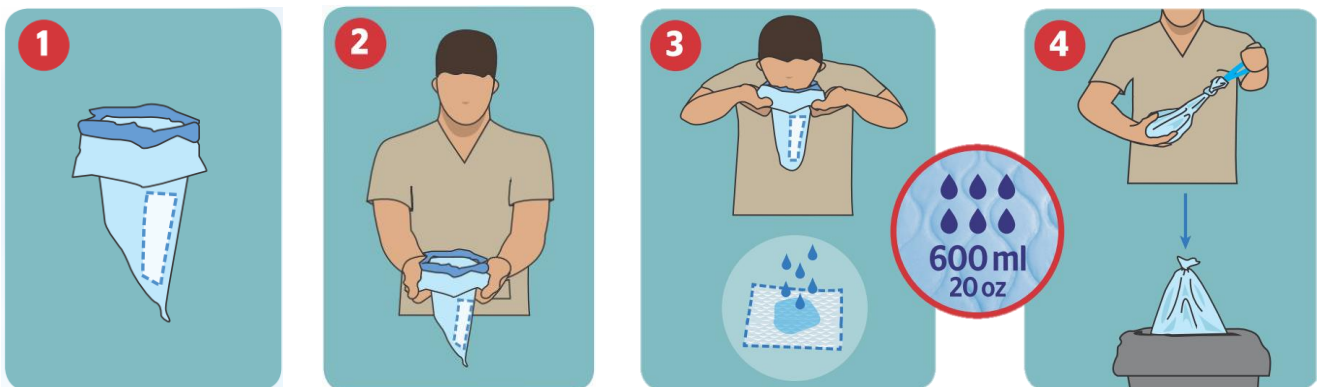

1. Open de doos en scheur de eerste zak af langs de perforatie.
2. De braaksel opvangzak is klaar voor gebruik, de handen zijn volledig beschermd, de inlegger ligt op de bodem van de zak (absorptie tot 600 ml/20 oz lichaamsvloeistoffen)
3. De patiënt gebruikt de zak om in te braken.
4. Na gebruik, trek aan de touwtjes en knoop de zak dicht. Indien nodig, maak een extra knoop in de zak zelf. Gooi weg bij het restafval of volgens de regels van de instelling (bij een infectie afvoeren bij klinisch afval).