

## PROTOCOL – OPVANGZAKKEN VOOR HET TOILET

### Omschrijving

Hygiënische zakken voor eenmalig gebruik voorzien van een handige treksluiting en absorberende inlegger voor ontlasting, urine en andere lichaamsvloeistoffen.

Medisch hulpmiddel klasse I – CE.

### Aanbevolen voor


- Isolatie van patiënten bij infecties
- Functie onderzoeken of behandelingen met biociden (radioactieve onderzoeken, chemotherapie etc) als lozing hiervan op het oppervlaktewater verboden is.
- Grote bedpannen of ondersteken (voor obesitas patiënten) en toiletten.

### Voorzorgsmaatregel

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en schort).
- Gebruik en voer af volgens de regels van de instelling. Niet doorspoelen.
- Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.



## Gebruiksaanwijzing

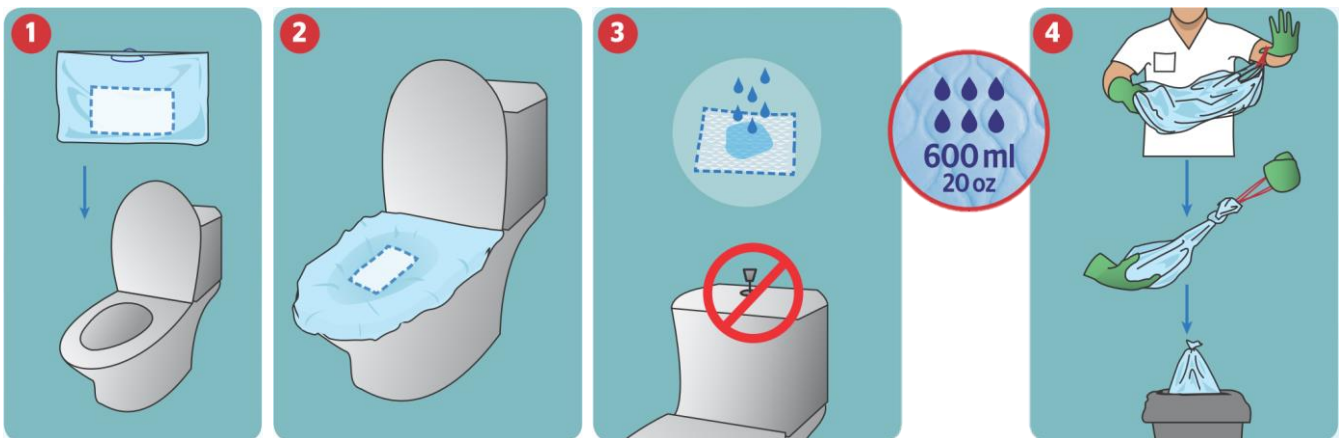

1. Open de doos en scheur de eerste zak af langs de perforatie.
2. Plaats de zak in het toilet. De zak beschermt het hele toilet. De inlegger op de bodem van de zak plaatsen (absorptie tot 600 ml/20 oz lichaamsvloeistoffen)
3. De patiënt doet zijn behoefte. Niet doorspoelen.
4. Haal de volle zak weg, trek de koordjes aan en knoop de zak dicht. Indien nodig, maak een knoop in de zak zelf. Gooi weg bij het restafval of volgens de regels van de instelling (bij een infectie afvoeren bij klinisch afval).