

# PROTOCOL – TOILETSTOEL OPVANGZAKKEN



## Omschrijving

Hygiënische zakken voor eenmalig gebruik voorzien van een handige treksluiting en absorberende inlegger voor ontlasting, urine en andere lichaamsvloeistoffen.  
Medisch hulpmiddel klasse I – CE.


## Aangeboden voor

- Gebruik in thuissituatie (thuiszorg).
- Verpleeghuizen.
- Revalidatiecentra.
- In ziekenhuizen:
  - Langdurig verblijf.
  - Oncologie (hematologie etc.).
  - Dialyse Afdeling.
  - Isolatie patiënten.

## Voorzorgsmaatregel

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en schort).
- Gebruik en voer af volgens de regels van de instelling. Niet doorspoelen.
- Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren.

## Gebruiksaanwijzing

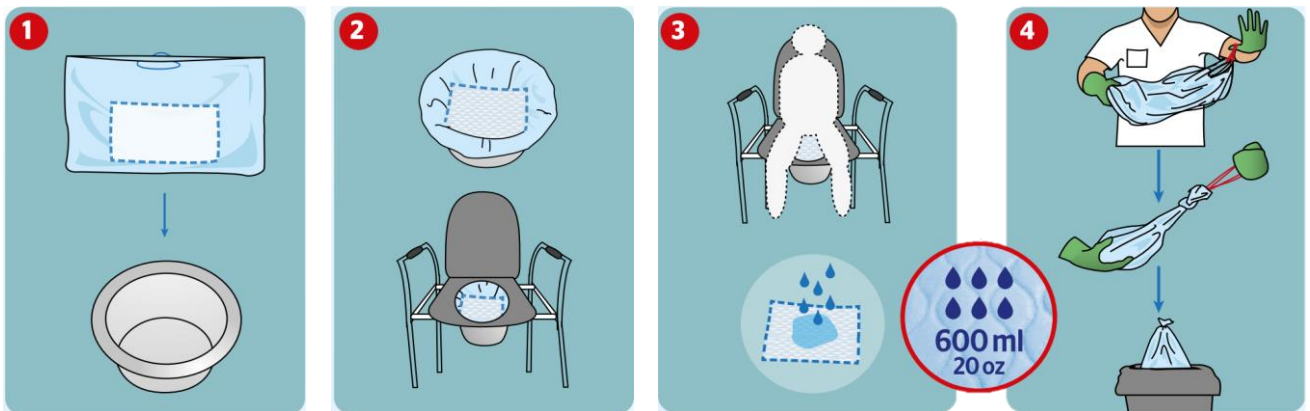

1. Open de doos en scheur de eerste zak af langs de perforatie.
2. Plaats de zak over de bedpan of emmer van de toiletstoel. De zak beschermt de hele bedpan of emmer. De inlegger op de bodem van de zak plaatsen (absorptieve tot 600 ml/20 oz lichaamsvloeistoffen).
3. De patiënt doet zijn behoefte.
4. Haal de volle zak weg, trek aan de koordjes en knoop de zak dicht. Indien nodig, maak een knoop in de zak zelf. Gooi weg bij het restafval of volgens de regels van de instelling (bij een infectie afvoeren bij klinisch afval).