



Handleiding: Able2 Rolstoel Magnesium Ultralight
Artikelnummer: PR32111



Inhoudsopgaven:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgaven:.....	2
1. Instructies.....	4
1.1 – Toepassing.....	4
1.2 – Indicatie.....	4
1.3 – Contra-indicatie.....	4
2. Productomschrijving.....	5
2.1 – Inhoud van de verpakking.....	5
2.2 – Basisonderdelen.....	5
2.3 – Modelgegevens.....	6
3. In gebruik nemen.....	7
3.1 – Reiken, leunen en bukken.....	9
3.2 – Let op.....	9
3.3 – Achterover/kantelen (alleen voor begeleiders).....	9
3.4 – Wiel.....	10
3.5 – Zijwiel.....	10
3.6 – Dwarsverbindingen.....	10
3.7 – Veiligheidscontroles.....	10
3.8 – Remmen.....	11
3.9 – Dwarsverbindingen.....	11
3.10 – Rokbeschermers.....	11
3.11 – Armleuningen.....	11
3.12 – Zitting en rug.....	11
3.13 – 22” wielen.....	11
3.14 – 6” wielbussen.....	11
3.15 – Banden.....	11
4. Veiligheidsadvies.....	12
4.1 – Veiligheidsmaatregelen.....	12
4.2 – De rolstoel uit de doos halen.....	14
5. Onderhoud.....	14
5.1 – Tabel van inspectiefrequentie.....	15
6. Garantievoorwaarden.....	16

1. Instructies

Allereerst willen we u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt door een van onze rolstoelen te kiezen.

Door voortdurend onderzoek te doen naar de wensen van de consument en een duidelijke focus op kwaliteit, heeft een zorgvuldig selectie- en ontwikkelingsproces plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in een innovatief en kwalitatief hoogstaand assortiment handbewogen rolstoelen waarmee consumenten een onafhankelijker leven kunnen leiden.

De levensduur van de rolstoel is echter afhankelijk van uw zorg en onderhoud; deze handleiding helpt u vertrouwd te raken met de werking van uw rolstoel en adviseert u over het in goede staat houden van uw rolstoel, zodat u verzekerd bent van een lange levensduur.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de rolstoel in gebruik neemt en houd er rekening mee dat uw rolstoel in uitstekende staat zal zijn en zelfs na vele jaren nog perfect zal functioneren als u onze adviezen opvolgt.

1.1 – Toepassing

De rolstoel wordt gebruikt voor het individueel vervoer van mensen met een beperking, waaronder personen met een dwarslaesie, cerebrale parese, diverse verwondingen aan de onderste ledematen, neuromusculaire aandoeningen, na craniaal-craniaal letsel of voor geriatrische patiënten.

1.2 – Indicatie

Er is sprake van een indicatie bij onvermogen om te lopen of bij ernstig beperkte mobiliteit, veroorzaakt door één van de volgende aandoeningen:

- Verlamming
- Verlies van ledematen
- Aangeboren of verworven afwijkingen/vervormingen van ledematen
- Gewrichtscontracturen of gewrichtsschade (anders dan aan beide armen)
- Overige aandoeningen die het lopen ernstig belemmeren

1.3 – Contra-indicatie

Het gebruik van de rolstoel wordt als ongeschikt beschouwd bij de volgende omstandigheden:

- Valse of verstoorde sensaties (sensorische stoornissen)
- Ernstige evenwichtsproblemen
- Verlies van ledematen aan beide armen
- Gewrichtscontracturen of gewrichtsschade aan beide armen
- Onvermogen om zelfstandig te zitten
- Ernstig verminderd of ontoereikend gezichtsvermogen

2. Productomschrijving

De rolstoel wordt geleverd in een kartonnen doos. Bewaar de verpakking indien mogelijk – deze kan later van pas komen voor opslag of transport.

De rolstoel is grotendeels voorgeassembleerd en eenvoudig in gebruik te nemen. U hoeft enkel de rolstoel uit te klappen en de beensteunen op hun plaats te bevestigen.

In het volgende hoofdstuk leest u stap voor stap hoe u de rolstoel opzet en gebruikt.

2.1 – Inhoud van de verpakking

Controleer direct na ontvangst of de verpakking compleet is en geen beschadigingen vertoont. De doos bevat de volgende onderdelen:

- Eén kartonnen doos met beschermende verpakking
- Eén voorgeassembleerde rolstoel
- Eén set kuitband en rug-/zitkussens
- Eén paar beensteunen
- Eén set gereedschap

Neem bij ontbrekende of beschadigde onderdelen direct contact op met uw leverancier.

2.2 – Basisonderdelen



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Duwhendel | 11. Voorvork |
| 2. Stop-/self-lock rem | 12. 6" voorwiel |
| 3. Ontgrendelingshendel | 13. Verwijderbaar rugkussen |
| 4. Vaste armsteun | 14. Frame van magnesium |
| 5. 22" achterwiel | 15. Gordel |
| 6. Zijbescherming | 16. Verwijderbaar zitkussen |
| 7. Handvelg | 17. Afneembare beensteun |
| 8. Handrem | 18. Ontgrendelingsrem |
| 9. Dwarsstang | 19. Kuitband |
| 10. Reflector | 20. Opvouwbare voetplaat |

2.3 – Modelgegevens

- Totale lengte: 98 cm
- Totale breedte: 70 cm
- Totale hoogte: 90 cm
- Rugleuninghoogte: 41 cm
- Zithoogte: 50 cm
- Zitbreedte: 46 cm
- Zitdiepte: 40 cm
- Gevouwen breedte: 31 cm
- Armleuninghoogte: 68 cm
- Nettogewicht: 10 kg
- Verpakkingsafmeting: 76 × 34 × 80 cm (0,21 m³)

3. In gebruik nemen

Het openen van de rolstoel

Duw de zitting aan beide zijden licht naar beneden en de rolstoel wordt geopend. Zorg ervoor dat de zitbuizen aan beide zijden goed in de groeven zitten.



Het opvouwen van de rolstoel

Draai de voetplaten omhoog en trek de zitting omhoog door de handgrepen aan de zijkanten van de zitting vast te pakken.



De beensteun vastmaken

Steek het ene uiteinde van de beensteun in het gat van het frame en plaats het andere uiteinde van de beensteun in de buis van het frame. Houd de beensteun vast en draai hem naar binnen om hem vast te zetten.



De beensteun verwijderen

Houd de beensteun vast en trek tegelijkertijd de ontgrendelingshendel omhoog. Draai de beensteun vervolgens naar buiten en trek hem omhoog.



Het achterwiel verwijderen

Houd het achterwiel vast, druk op de knop en trek de as er tegelijkertijd uit.



Het achterwiel vastzetten

Houd het achterwiel vast, druk op de knop en steek het uiteinde van de as tegelijkertijd in het gat van het frame.



De rolstoel stoppen en vergrendelen

Pak de handgreep en de zelfvergrendelingsrem samen vast om te stoppen. Druk de zelfvergrendelingsrem omlaag om te vergrendelen en trek de zelfvergrendelingsrem omhoog om te ontgrendelen.




Duw de handrem naar voren om te vergrendelen en trek de handrem naar achteren om te ontgrendelen.




De rugleuning in- en uitvouden

Trek de waterpas naar voren of naar achteren en klap de rugleuning in. Duw de rugleuning omhoog om uit te klappen.

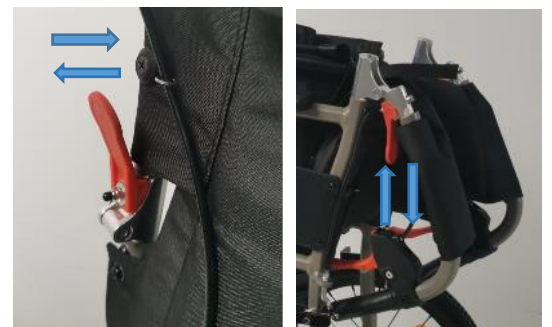

De voetplaat inklappen

De voetplaat kan omhoog worden gedraaid.
Til hem op zoals op de rechter foto.

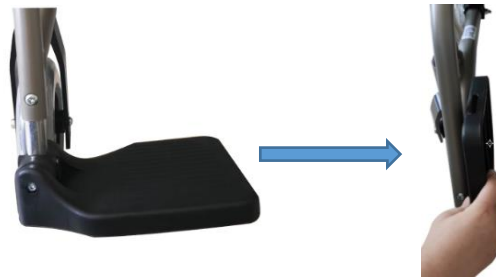

3.1 – Reiken, leunen en bukken

Wanneer u moet reiken, leunen of bukken, is het belangrijk om de voorwielen van de rolstoel te gebruiken voor extra stabiliteit. Zet de voorwielen in een voorwaartse positie en gebruik de remmen. Ga niet op de voorkant van de stoel zitten en probeer niet naar hoge voorwerpen te reiken, omdat dit kan leiden tot voorover kantelen en letsel bij de gebruiker. Probeer geen voorwerpen op te pakken die op de vloer tussen uw benen liggen. Zoek altijd hulp als een voorwerp zich buiten uw bereik bevindt.

Voor achterover leunen, plaats de rolstoel zo dicht mogelijk bij het voorwerp dat je probeert te bereiken. Reik niet te ver en leun niet over de rugleuning heen, want dit kan de stoel doen kantelen of instabiel maken. Reik ook niet te ver naar achteren en pas je lichaamspositie niet te sterk aan, omdat dit instabiliteit kan veroorzaken. Laat de gebruiker nooit zonder toezicht achterover in de stoel 'vallen', omdat dit de rolstoel kan laten kantelen. Ga niet op de voetplaten staan, want hierdoor kantelt de rolstoel naar voren. Klap altijd de voetsteunen omhoog en gebruik de vloer voor extra stabiliteit. Roep altijd hulp in wanneer u moeilijkheden ondervindt.

3.2 – Let op

Na het beoordelen van de rolstoelgebruiker moet de zorgconsulent de stabiliteit van de persoon in de rolstoel vaststellen. Indien nodig moet de zorgconsulent een rolstoel met anti-kantelhendels aanbevelen.

3.3 – Achterover/kantelen (alleen voor begeleiders)

Pak de duwhandgrepen stevig vast en plaats één voet op de kantelhendel. Duw de kantelhendel omlaag totdat het evenwichtspunt is bereikt. De begeleider zal het verschil in gewichtsverhouding voelen en kan het kantelen bedienen met de duwhandgrepen en de kantelhendel. Draai de rolstoel in de gewenste richting.

Om uit de gekantelde positie te komen, houdt u één voet op de kantelhendel en een stevige greep op de duwhandgreep. Laat de rolstoel langzaam op de grond zakken.

Dezelfde procedure kan worden gebruikt om personen te laten zakken en op te tillen langs stoepranden. Er moet altijd een begeleider beschikbaar zijn bij het beklimmen van stoepranden.

De rolstoel moet op de hierboven beschreven manier naar achteren worden gekanteld. Bij het beklimmen van een stoeprand wordt de rolstoel omhoog en naar achteren getrokken. Bij het afdalen

van de stoeprand wordt dezelfde handeling uitgevoerd als bij het opklimmen; laat de rolstoel langzaam langs de stoeprand zakken met de stoel achterover gekanteld.

Zorg ervoor dat de begeleider voldoende lichaamsgewicht heeft om zowel de rolstoel als de gebruiker vast te houden. Als dit niet het geval is, zorg dan dat er twee begeleiders assisteren.

Gebruik de rolstoel niet op een roltrap en gebruik de rolstoel niet om trappen op of af te gaan.

3.4 – Wiel

De grote wielen moeten ten minste maandelijks worden gecontroleerd op de juiste asspanning. Als het wiel los zit of wiebelt, draai dan de asbout iets vaster aan. Om te controleren of de as goed vastzit, leun de stoel naar één kant en draai aan het wiel. Het wiel moet stoppen met draaien wanneer je langzaam naar beneden loopt. Als het wiel abrupt stopt, zit de as te strak en moet deze worden losgedraaid.

3.5 – Zijwiel

De zijwielen zijn met een asmoer en -bout aan de vork bevestigd. Deze moer en bout moeten regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het wiel veilig en vrij draait. De zwenkvork van het wiel zorgt ervoor dat de rolstoel goed kan draaien. Onder de zwenkdop zit een afstelborgmoer. Wrik de dop los om de borgmoer bloot te leggen. Als de borgmoer te strak zit, zal de rolstoel moeilijk te besturen zijn. Als de borgmoer te los zit, kan het wiel fladderen, wat de stoel instabiel maakt.

Om te controleren of de borgmoer goed vastzit, kantel de stoel naar achteren, zodat de duwhandvatten op de vloer rusten. Til het zwenkwiel omhoog richting het plafond en duw het voorzichtig naar beide zijden omlaag. Het wiel en de vork moeten vrij kunnen zwenken naar de onderkant van de boog en na een slingerbeweging recht naar de vloer hangen. Als het wiel schuin naar één kant stopt, draai dan de borgmoer op de vorkstang los.

3.6 – Dwarsverbindingen

Let op! Smeer de middelste bout regelmatig in. Dit helpt de stoel soepel te buigen bij het oversteken van oneffen oppervlakken.

3.7 – Veiligheidscontroles

Voer regelmatig de volgende inspecties uit. De frequentie van deze inspecties wordt bepaald door het gebruik van de rolstoel. Het wordt aanbevolen om uw rolstoel jaarlijks door uw dealer te laten inspecteren en onderhouden.

- De rolstoel opent en sluit soepel.
- De rolstoel loopt recht, zonder overmatige weerstand of trekken naar één kant.

3.8 – Remmen

- De remmen schuren niet over de wielen tijdens het rijden.
- De remmen zijn gemakkelijk aan te trekken.
- Er zijn geen losse koppelingen op de rem.
- De remkabels zijn niet beschadigd.

3.9 – Dwarsverbindingen

- Controleer op slijtage of krommingen.
- De scharnierbout zit goed vast, maar schuift vrij.

3.10 – Rokbeschermers

Controleer de rokbeschermers op schade, gebroken panelen of scherpe randen. Zorg ervoor dat de schroeven of klinknagels stevig vastzitten.

3.11 – Armleuningen

Controleren op beschadigingen

Controleer of de armsteunen stevig vastgeschroefd zijn.

Als je een model hebt met volledig afneembare armsteunen, moet bij het opnieuw monteren het label op de beschermplaat aan de buitenkant van de rolstoel zitten.

3.12 - Zitting en rug

Controleer de randen op scheuren Controleer op overmatige rek.

3.13 - 22" wielen

Geen overmatige zijwaartse beweging wanneer de wielen worden rondgedraaid. Borgmoeren van assen zitten goed vast.

3.14 - 6" wielbussen

Controleer de stang op de juiste spanning door het wiel rond te draaien. Het wiel moet geleidelijk tot stilstand komen. Pas de spanning op de borgmoer aan als het wiebelen aanhoudt, vervang dan de lagers.

3.15 – Banden

Controleer op slijtage.

Controleer of de banden de juiste spanning hebben als ze zijn uitgerust met luchtbanden.

4. Veiligheidsadvies

Deze gebruikershandleiding biedt richtlijnen voor de meest voorkomende procedures en technieken voor het veilig bedienen en onderhouden van uw rolstoel. Oefen deze technieken totdat u bekwaam bent in het manoeuvreren rond obstakels en zich comfortabel voelt bij het besturen van uw rolstoel. De technieken in dit boekje dienen als uitgangspunt voor nieuwe rolstoelgebruikers, waarbij veiligheid altijd voorop staat.

Gebruik dit boekje als basisgids. Veel rolstoelgebruikers passen de technieken in dit boekje succesvol toe. Het is echter ook raadzaam om een zorgprofessional te raadplegen voordat de rolstoel in gebruik wordt genomen. Zorg er altijd voor dat de remmen gebruikt worden bij het in- en uitstappen van de rolstoel, en dat de gebruiker bij het rijden in de rolstoel gebruik maakt van de veiligheidssystemen in het motorvoertuig.

4.1 – Veiligheidsmaatregelen

1. Zet de rolstoel altijd op de rem bij het in- en uitstappen.
2. Ga niet op de voetplaten staan voordat u in of uit de rolstoel stapt. Klap de voetsteunen in of schuif ze opzij. Sta niet op de voetplaten bij het verplaatsen van of naar de rolstoel om kantelen te voorkomen.
3. Gebruikers die extra stabiliteit voor hun hoofd nodig hebben, mogen de rolstoel alleen verplaatsen onder toezicht van een ervaren verzorger.
4. Het dragen van de rolstoel met de gebruiker is niet toegestaan.
5. Zorg voor voldoende ruimte aan beide zijden van de rolstoel bij het verplaatsen door kassa's of gangpaden om schade te voorkomen.
6. Houd u aan de verkeersregels bij het gebruik van de rolstoel op de openbare weg.
7. Gebruik de rolstoel niet onder invloed van alcohol, medicijnen of verdovende middelen, zelfs niet binnenshuis.
8. De rolstoel is niet bedoeld om de gebruiker de trap op of af te vervoeren, als brancard te gebruiken of eraan te trekken. Dit kan de rolstoel beschadigen en gevaarlijke situaties veroorzaken.
9. De rolstoel is ontworpen voor gebruik binnen en buiten op verharde, vlakke oppervlakken.
10. Gebruik de rolstoel niet op ondergronden die onvoldoende ondersteuning bieden, zoals bevroren, nat, olieachtig of sterk geschuurd oppervlak. Dit kan leiden tot valgevaar.
11. Zorg ervoor dat alle vier de wielen van de rolstoel de grond raken en goed kunnen draaien.
12. Voor steile of lange hellingen, hoge treden en andere moeilijke obstakels is de hulp van een begeleider noodzakelijk.
13. Als de gebruiker onvoldoende ervaring heeft, vraag dan om hulp bij het overwinnen van obstakels.
14. Laat de rolstoel niet in de buurt van open vuur staan.
15. Wees bewust van de temperatuur van de rolstoel, vooral als deze is blootgesteld aan zon of andere warmtebronnen, of als de metalen onderdelen koud aanvoelen bij lage temperaturen.
16. Draag de rolstoel altijd vast bij het frame, niet aan de armleuningen of voetsteunen.
17. De rolstoel mag niet worden gebruikt als zitplaats in een motorvoertuig (bijv. bus of trein).

18. De rolstoel is ontworpen voor gebruikers tot 100 kg. Overschrijd dit gewicht niet.
19. De rolstoel moet altijd gemakkelijk in- en uitklapbaar zijn. Raadpleeg de instructies bij problemen.
20. Wees voorzichtig bij het rijden op hellende oppervlakken. De maximaal toegestane hellingshoek is 6°. Gebruik anti-kiepwielen en vraag om hulp bij steile hellingen.
21. Gebruik de remmen alleen om ongewenste bewegingen te voorkomen, niet om de rolstoel af te remmen tijdens het rijden.
22. Beide remmen moeten goed zijn afgesteld. Een slechte afstelling kan de rolstoel moeilijk te besturen maken.
23. Controleer regelmatig de bandenspanning. Te lage bandenspanning kan de remwerking verminderen.
24. Reik niet naar achteren bij het tillen van voorwerpen om te voorkomen dat u achterover valt.
25. Leun niet te ver naar voren bij het reiken om kantelen van de rolstoel te voorkomen.
26. Reik niet vanaf de voorkant van de vloer als u uit de rolstoel schuift.
27. Zet altijd de remmen vast bij het op- en afstappen of bij het veranderen van de positie van de gebruiker.
28. Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de rolstoel achter, vooral niet op oprijplaten of hellingen.
29. Controleer na de montage van de wielen of de vergrendeling van de verbindingssas goed werkt. Er moet een klik hoorbaar zijn wanneer de as goed vast zit.
30. Gebruik de parkeerrem niet tijdens het rijden, dit kan gevaarlijk zijn.
31. Controleer altijd of de rem goed werkt na een afstelling en zorg dat de remmen schoon en correct afgesteld zijn.
32. Verontreiniging van de banden door olie, vet of water kan de remwerking verminderen.
33. Na langdurig gebruik kan de remkracht verminderen door speling tussen de remmen en de band van het wiel. Test de rem met een gebruiker om dit te controleren.
34. Bewaar de rolstoel op een veilige plaats en gebruik de juiste opslagmethode om de operationele parameters te behouden.
35. Vermijd het opslaan van de rolstoel in ruimtes met hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamers) of buiten in slechte hygiënische omstandigheden, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
36. Gebruik de rolstoel niet als er zichtbare schade is. Slijtage kan duiden op een potentieel risico. Laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
37. Bij rolstoelen met opblaasbare banden, overschrijd de maximale bandenspanning niet, zoals aangegeven op de band.
38. Belaad de rolstoel niet bij transport (bijv. in een bagagedrager) om schade aan de constructie te voorkomen.
39. Wees voorzichtig bij het inklappen van de rolstoel om beknelling van vingers of onderdelen te voorkomen.
40. Houd de rolstoel buiten het bereik van kinderen jonger dan vijf jaar.
41. Til de rolstoel niet op aan de armleuningen of verwijderbare voetsteunen.
42. Laat een gebruiker nooit zonder hulp in de rolstoel achterover vallen, dit kan leiden tot kantelen.
43. Leun niet naar voren tenzij u ervoor zorgt dat de wielen naar voren staan.
44. Vervang of monteer geen onderdelen die niet van het merk TAKAN zijn.
45. Bevestig geen veiligheidsgordels aan de wielen van de rolstoel.

4.2 – De rolstoel uit de doos halen

Kantel de doos op zijn kant zodat de duwbeugels van de rolstoel naar de vloer gericht zijn. Til de duwbeugels licht op en rijd de rolstoel uit de doos. Op deze manier hoeft u de rolstoel niet boven heuphoogte te tillen.

5. Onderhoud

Wanneer een onderdeel van uw rolstoel niet goed functioneert, kan dit gevaarlijke situaties veroorzaken. Regelmatige inspectie, afstelling en vervanging van versleten onderdelen zorgen voor jarenlang probleemloos gebruik.

Reiniging van de bekleding

Gebruik handwarm zeepsop voor het reinigen van de bekleding. **Let op!** Gebruik geen verfverwijderaar of oplosmiddelen op de bekleding.

Metalen onderdelen

Reinig alle metalen onderdelen met autowas of een vergelijkbaar middel. **Let op!** Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of andere materialen die krassen op de afwerking kunnen veroorzaken.

Banden

Controleer de banden regelmatig op slijtage en vervang ze indien nodig. Luchtbanden moeten wekelijks worden gecontroleerd en op de juiste spanning worden gehouden (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen bandenspanning). Massieve banden moeten worden vervangen wanneer ze los op de velg zitten of wanneer ze gebarsten of versleten zijn.

Stabiliteit

Wees altijd bewust van uw omgeving en zorg ervoor dat u zich niet in een situatie bevindt waarin uw rolstoel onstabiel kan worden. Dit is meestal te wijten aan ongunstige hellingen of oneffen terrein. Vermijd altijd steile hellingen, aangezien dit ertoe kan leiden dat de rolstoel achterover kantelt. Monteer altijd de anti-kantelwielen waar aanwezig.

Probeer steile hellingen te vermijden, aangezien dit de rolstoel onstabiel kan maken. Probeer bij het op- of afrijden van een helling (alleen voor rolstoelen met zelfrijdende wielen) uw lichaam zo te positioneren dat de stabiliteit van de rolstoel verbetert.

Gordelverstelling (indien aanwezig)

Uw gordel is af fabriek gemonteerd. Uw dealer dient u te laten zien hoe de gordel correct moet worden afgesteld. De gordel is ontworpen om ervoor te zorgen dat de gebruiker zich in de meest comfortabele en veilige positie bevindt tijdens het gebruik van de rolstoel.

Verstelling van uw gordel

Zorg ervoor dat u volledig achterover in de stoel zit, met uw bekken zo rechtop mogelijk en niet scheef. Sluit de gesp en plaats de gordel zo dat de heupbeenderen boven de gordel voelbaar zijn. Verstel de lengte van de gordel door aan het open uiteinde van de gordel te trekken. Als richtlijn geldt dat de gordel zo moet worden afgesteld dat er voldoende ruimte is voor twee vingers om tussen uw lichaam en de gordel te schuiven. Vervang de gordel onmiddellijk als deze beschadigd raakt.

5.1 – Tabel van inspectiefrequentie

Frequentie van inspectie	Onderwerp van controle	Opmerkingen
Voor de eerste montage	Controle van de technische staat van alle onderdelen in de verpakking	Controleer of er geen zichtbare mechanische schade aan de componenten is.
Voor elke rit	Controle van de wielen en remmen	De remmen kunnen slijten, controleer de staat van de remmen voor elk gebruik. Controleer ook de slijtage van de wielen en maak ze schoon van stof en zand.
Om de twee weken	Bevestigingsschroeven en moeren op hun juiste functie	Zorg ervoor dat alle moeren en bouten goed vast zitten.
Elke twee maanden	Schoonmaak, algemene staat	Bij mechanische schade, neem onmiddellijk contact op met de fabrikant.
Eén keer per maand	Wielassen	De wielassen moeten onderhouden worden door een paar druppels smeermiddel tussen de as en de naaf te brengen. Het voertuig moet omhoog worden getild zodat het wiel boven de grond is, het wiel moet vrij draaien zonder speling op de as. De voorwielen moeten ook goed draaien op de as van de richting.
Eén keer per maand	Staat van de snelkoppeling, schroefdraad- en soldeerverbindingen	Let op scheuren in het frame op de soldeerpunten en op de gaten die de bajonetaansluitingen blokkeren.
Eén keer per maand	Staat van de banden	Controleer of het loopvlak van de band niet versleten is en dat de banden geen zichtbare schade vertonen.

6.Garantievoorwaarden

De omvang van de garantie:

Binnen één jaar – vanaf de factuurdatum bieden wij garantie bij presentatie van de factuur.

Onder normale gebruiksomstandigheden bieden wij een gratis vervanging voor de items met de volgende defecten: frame, handvaten, velgen en wielen; evenals asdeformatie, gebroken assen, lagers en lasbreuken.

Binnen de garantietermijn bieden wij nieuwe onderdelen tegen een lagere prijs voor onderdelen die zijn gebroken door onjuist gebruik.

Wij bieden ook reparatie of onderdelen aan onze klanten wanneer de garantieperiode is verlopen, maar dit op basis van redelijke kosten.

De omvang van de niet-gedekte garantie:

Geen garantie: a) Beschadiging van de rugkussen, zitkussen, armleuning schuimrubber, rugleuning schuimrubber, decoratieve onderdelen na gebruik. b) Schade veroorzaakt door verkeerde handelingen, ongelukken, misbruik, onjuiste installatie en reparatie. c) Schade veroorzaakt door het aanpassen van het product zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. d) Schade door het overschrijden van de draagcapaciteit. e) Luchtlekkage van de binnenband, oppervlaktebeschadiging en roest.

Deze garantiekaart is niet overdraagbaar en alleen voor gebruik door de koper van de Takan-rolstoel.


Binnen de toegestane grenzen van de wet vervangt deze garantie elke andere garantie (bijvoorbeeld schriftelijke of mondelinge, expliciete of impliciete garantie, inclusief de garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel), die allemaal gebaseerd zijn op deze garantie.



TIANJIN TAIKANG SUNSHINE TECHNOLOGY CO. LTD
Beiyang Industrial Area, Yangcheng Village,
Jianghai County, Tianjin, China

Imported by:

Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762AR Zevenbergen
The Netherlands

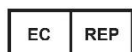

Sungo Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1,7
2909VA Capelle aan den IJssel